

AXIOM

BACKS

CB | FB | FL | LB | DL

BRUKERHÅNDBOK OG GARANTI



2024-03-04

INTRODUKSJON

Takk for at du kjøpte en Ki Mobility produkt!



ADVARSEL: Ikke bruk den uten at du har lest hele denne bruksanvisningen først. Om produkt brukes før hele bruksanvisningen er lest, kan det føre til alvorlig personskade på bruker og/eller ledsager.

Ki Mobility anbefaler opplæring av en ergoterapeut, spesialist i hjelpemidler eller annen kompetent klinisk eller teknisk ressurs i trygg bruk av denne produkt før du kjører i den.

Hvis du har noen spørsmål vedrørende produkt, bruksanvisningen eller servicen som gis, ikke nøl med å kontakte din autoriserte leverandør, en autorisert representant eller Ki Mobility. Du kan få tak i Ki Mobility på:

+1 715-254-0991



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
USA



www.kimobility.com (Inkluderer forhandlerfinner og tilgang til trykt informasjon)

eller via vår autoriserte EU-representant




Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Sweden

INNHOOLD

	Egenskaper ved Axiom-ryggstøtten.....	3
A.	Bruksområde	4
B.	Sikkerheten din	4
C.	Signalord.....	4
D.	Symbolordliste	5
E.	Kontroller huden din daglig	6
F.	Generelle advarsler	6
G.	Posisjoneringsbelter eller -seler.	7
H.	Å beskytte en Axiom ryggstøtte.....	8
I.	Plassering av trekket	8
J.	Sidestøtter (swing-away)	9
	Konfigurering, justering og vedlikehold.....	10
A.	Feste og feste på nytt.....	10
B.	Skyve eller løfte	13
C.	Axiom-ryggen og transportsikkerhet.....	14
D.	Vedlikehold.....	15
E.	Rengjøring.....	16
F.	Sterilisering.....	17
G.	Å montere Axiom på nytt etter rengjøring.....	17
	KI MOBILITY – BEGRENSET GARANTI	18

Axiom ekstern rygg

Egenskaper ved Axiom-ryggstøtten

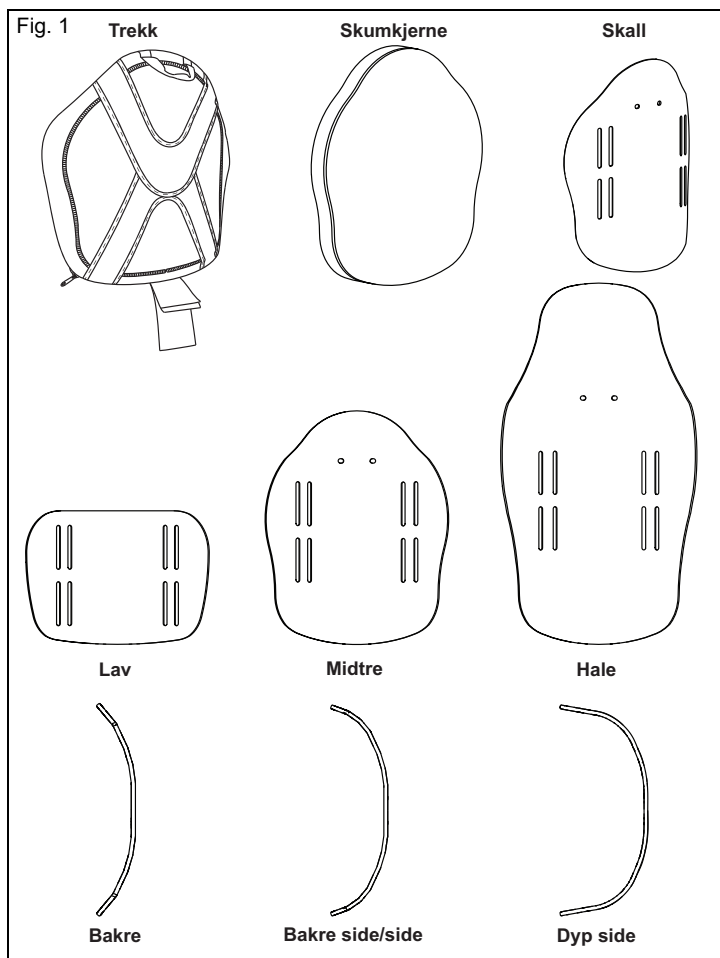

 MAKSIMAL BRUKERVEKT: 136 kg (300 lbs)

MERK: Funksjonene til Axiom Custom Back vil variere med bestillingen og vil kanskje ikke stemme overens med det som vises i Fig. 1.

A. Bruksområde

Ki Mobilitys rullestolrygger er tenkt til å gi støtte til sittestillingen, trykkfordeling og forbedret sittetoleranse.

B. Sikkerheten din

Alle alvorlige hendelser eller personskader som er knyttet til bruken av produktet ditt eller tilbehøret må øyeblikkelig rapporteres, hvis hendelsen direkte eller indirekte fører til alvorlig redusert helse eller dødsfall for brukeren eller en annen person. Rapport alle alvorlige hendelser og/eller skader til Ki Mobility og, slik det kreves av lokale forskrifter, til kompetente helsemyndigheter der brukeren og/eller andre personer er juridisk hjemmehørende.

Ikke bruk dette produktet før du har lest hele denne bruksanvisningen. FØR du begynner å kjøre, må du få opplæring i trygg bruk av dette produktet av en terapeut eller andre kompetente klinikere eller teknikere. Ki Mobility produserer mange forskjellige produkter som kan oppfylle dine behov. Den beste anerkjente praksisen for å velge et produkt er å snakke med hjelpemiddelsentralen eller en annen kompetent tekniker og erfarne klinikere, slik som fysioterapeut, ergoterapeut eller lege. Endelig valg av type produkt, alternativer og justeringer er fullt ut ditt valg og dine tekniske og kliniske rådgivere. Alternativene som velges samt konfigureringen og justeringen av produktet, har en direkte innvirkning på dets ytelse, stabilitet og hvor godt det oppfyller behovene dine.

C. Signalord

I denne håndboken vil du finne det som kalles «signalord». Disse ordene brukes for å identifisere og formidle alvorlighetsgraden av forskjellige farer. Før du bruker denne stolen bør du og alle personer som kan assistere deg, lese hele denne håndboken. Merk deg signalordene og ta hensyn til alle merknader, forsiktighetsregler eller advarsler. Pass på at du følger alle bruksanvisninger og bruker stolen på en trygg måte. Signalordene viser til en fare eller en usikker praksis som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall, for deg eller andre personer. «Advarslene» kommer i tre hovedkategorier, som følger:

MERK – Merk viser til en potensielt farlig situasjon som kan resultere i at stolen får redusert ytelse eller det kan skade rullestolen, dersom den ikke avverges.























VÆR FORSIKTIG: Vær forsiktig viser til en potensielt farlig situasjon som kan resultere i skader på rullestolen og personskade for deg selv, dersom den ikke avverges.



ADVARSEL: Advarsel viser til en potensielt farlig situasjon som kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall, dersom den ikke avverges

Disse signalordene vil finnes gjennom hele håndboken, der det er riktig å markere den farlige situasjonen. Se Avsnitt G. for farlige situasjoner som vil gjelde for generell bruk av dette produktet.

D. Symbolordliste

SYMBOL	DEFINISJON
	Angir produsenten av det medisinske utstyret.
	Produksjonsdato (YEAR/MM/DD).
	Hvis dette symbolet vises på emballasjen, en medisinsk enhet eller i bruksanvisningen, betyr det at brukeren må lese og forstå advarsler for å unngå skade eller personskade.
	Angir type medisinsk utstyr.
	Angir produsentens katalognummer for identifisering av det medisinske utstyret.
	Angir autorisert representant i det europeiske fellesskapet.
	Angir produsentens erklæring om at produktet oppfyller kravene i de anvendbare EU-direktivene.
	Opplyser om at brukeren må se bruksanvisningen.
	Opplyser om at brukeren må se den elektroniske bruksanvisningen som er tilgjengelig på de angitte nettsidene.
	Indikerer et nettsted der en bruker kan finne ytterligere informasjon om det medisinske utstyret.
	Indikerer en spesifisert maksimal vektgrense (pund/kg).
	Indikerer et festepunkt for overflytting.
	Indikerer et punkt med klemfare.
	Angir organisasjonen som importerer det medisinske utstyret inn i regionen.
	Angir produsentens partikode for identifisering av partiet eller loten.
	Maskinvask, varm
	Må ikke blekes
	Tørke på snor eller i tørketrommel med kaldluft.
	Må ikke strykes
	Må ikke renses

E. Kontroller huden din daglig

Disse Axiom sete- og posisjoneringsprodukter er konstruert for å forbedre trykkfordelingen og øke tålegrensen for sitting. Om puten som leveres vil være riktig for dine individuelle behov, kan ikke fastslås på forhånd. Huden din påvirkes av ulike ting i ditt daglige liv og av din medisinske tilstand, inkludert bruk av dette produktet. Sørg for å følge alle hudpleietiltak som legen din har satt opp.

Brukere av dette produktet må passe på at huden deres inspiseres jevnlig for å se etter endringer. Hvis du ser endringer må du avslutte bruken av dette produktet med en gang og snakke med legen din. En viktig klinisk indikator for at vev brytes ned, er om huden blir rød. Hvis huden din blir rød, avslutt bruken av dette produktet med en gang og snakk med legen din. Vær spesielt nøye med å inspisere områdene knyttet til hoftene, slik som trokantene og sittebensknutene.

ADVARSEL

ADVARSEL: Hvis du ikke velger en Axiom-rygg som passer rullestolen din på riktig måte, kan det påvirke huden og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

ADVARSEL

ADVARSEL: Hvis du ikke utfører en skikkelig hudinspeksjon eller fortsetter å bruke en Axiom-rygg etter at det har oppstått hudendringer kan det påvirke hudens integritet og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

F. Generelle advarsler

ADVARSEL

ADVARSEL: Ikke bruk eller installer denne Axiom-ryggen uten at du først har lest og forstått denne håndboken. Kontakt din autoriserte Ki Mobility-leverandør eller legen din hvis du ikke er i stand til å forstå advarslene og bruksanvisningen. Å ikke gjøre dette kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

ADVARSEL

ADVARSEL: Installasjon av en Axiom-rygg på en rullestol kan påvirke tyngdepunktet til rullestolen. Endringer i tyngdepunktet kan påvirke stabiliteten i rullestolen og føre til et velt eller fall fra rullestolen, som igjen kan føre til alvorlig personskade. Gå alltid gjennom bruksanvisningen for rullestolen din for å se om endringer på rullestolen kan være nødvendig for å gi tilstrekkelig stabilitet etter at du har lagt til en Axiom-rygg.

ADVARSEL

ADVARSEL: Integriteten av huden din kan påvirkes av mange sider av ditt daglige liv og medisinske tilstand, inkludert bruk av dette produkt. Pass på å følge alle hudpleietiltak som legen din har satt opp. Brukere av dette produktet må passe på at huden deres inspiseres jevnlig for å se etter endringer, slik legen foreskriver det. Å ikke gjøre dette kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

G. Posisjoneringsbelter eller -seler.



ADVARSEL: Feil bruk av posisjoneringsbelter kan føre til at brukeren sklir under posisjoneringsbeltet i rullestolen. Hvis det skulle skje, kan det oppstå kompresjon eller kvelning på grunn av trykk fra beltet. Hvis dette skjer, kan brukerens pust bli hindret og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.



ADVARSEL: Feil bruk av posisjoneringsbelter kan føre til at kroppsdeler blir hengende fast, noe som kan begrense bevegeligheten og bevegelser. Det kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Ki Mobility anbefaler at det brukes belter for posisjonering. Belter for posisjonering kan redusere faren for å falle ut av rullestolen.

Posisjoneringsbelter som belter og seler og stropper foran overkroppen er konstruert for å bistå, holde på og støtte riktig posisjonering og sittestilling i rullestolen.

- Sørg for at brukeren ikke sklir under posisjoneringsbeltet i rullestolsetet.
- Posisjoneringsbeltet må sitte godt, godt nok til at posisjonen holdes, men ikke så stramt at det hindrer pusten. Det skal være mulig å få en åpen hånd mellom beltet og brukeren.
- Riktig bruk av puter kan bidra til hoftestabilitet og redusere sklifaren.
- Bruk ALDRI posisjoneringsbelter.
 - a. Som fastbinding – tvangsmidler har egne regler. Med mindre du lett kan fjerne beltene i et nødstilfelle: hvis det ikke er mulig, snakk med rådgivende helsepersonell om andre muligheter for å hjelpe deg med sittestillingen
 - b. På en bruker som er bevisstløs eller opprørt
 - c. Som sikring eller sikkerhetsbelte i et motorkjøretøy. Et posisjoneringsbelte er ikke konstruert for å erstatte et sikkerhetsbelte som er festet til rammen i kjøretøyet, noe som kreves for et effektivt sikkerhetsbelte. Ved en plutselig stopp vil brukeren bli kastet forover med hele kraften fra stoppen. Rullestolens setebelter kan ikke hindre dette, og det kan oppstå ytterligere skader fra belter eller stopper. Se avsnittet om transport i denne håndboken for ytterligere informasjon.

H. Å beskytte en Axiom ryggstøtte

Unngå langvarig påvirkning fra ugunstige forhold i omgivelsene. Dette kan inkludere for mye påvirkning fra sollys og temperaturer, enten varme eller kulde. Det kan føre til redusert ytelse fra Axiom-ryggen.

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hvis du ikke beskytter Axiom-ryggen kan det føre til endringer som kan påvirke hudens integritet og føre til alvorlig skade eller dødsfall.


Selv om Axiom-ryggen er produsert i henhold til brannfarestandardene på merkingen, må du unngå å utsette puten for åpne flammer eller ekstreme varmekilder slik som en brennende sigarett. Det kan føre til at puten antennes eller slipper ut skadelige gasser.

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hvis du ikke beskytter Axiom-ryggen mot ekstrem varme kan det føre til at Axiom-ryggen antennes eller slipper ut skadelige gasser, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

I. Plassering av trekket

Axiom-ryggen er designet for å sitte i en bestemt retning, og den må plasseres riktig i rullestolen med trekket riktig orientert mot skumunderlaget. Det er merket for å vise riktig orientering. Se fig. 2.

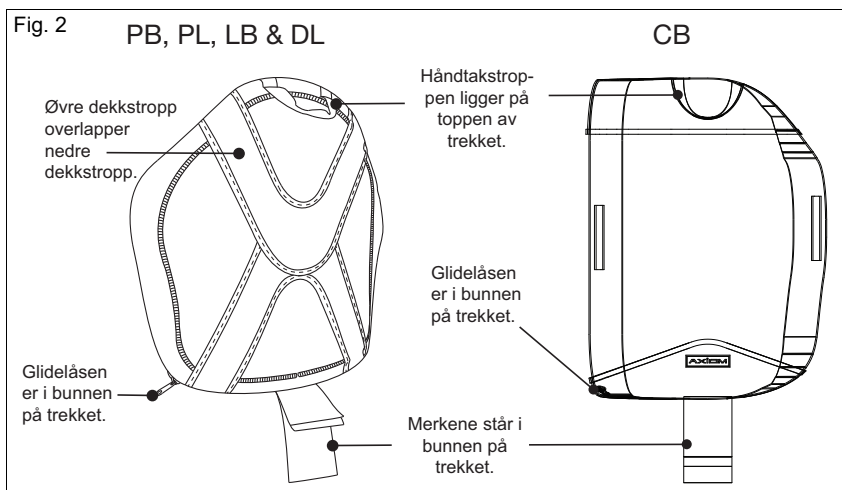


⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hvis du ikke plasserer Axiom-ryggputen og overtrekket på riktig måte, kan det påvirke hudens integritet og føre til alvorlig skade eller dødsfall.

J. Sidestøtter (swing-away)

Bruk

1. Skyv inn den røde tappen på svingens sidehengsel. Sving lateralen til ønsket plassering.

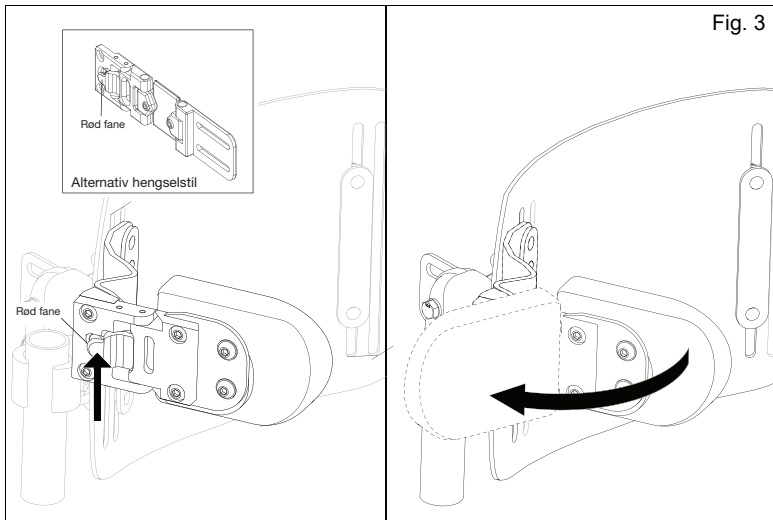


2. Returner sideryggen til standardstillingen og kontroller at den «klikker» eller låses på plass.

Konfigurering, justering og vedlikehold


A. Feste og feste på nytt

Identifiser maskinvaretypen

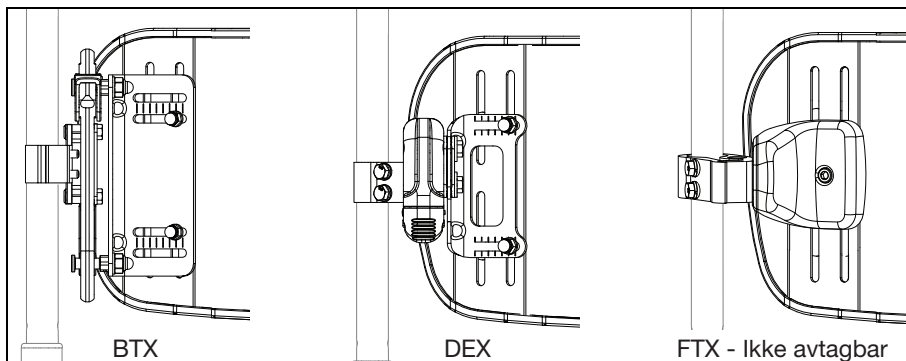


BTX Fjerning

1. BTX - Fjern sikkerhetslåsesplinten (Fig.4:A).

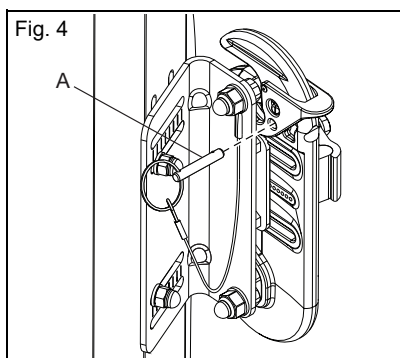


2. Sett låsemekanismen i frigjøringsposisjonen (Fig. 5).

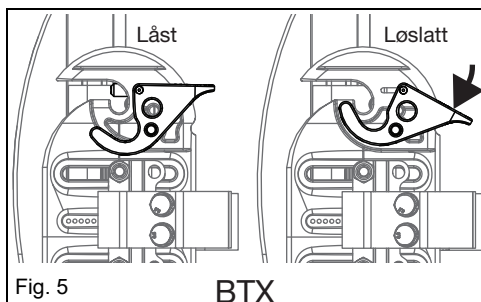


A. Feste og feste på nytt (fortsettelse)

3. Trekk fremover og fjern slik at den nedre spalten kommer ut først. Se Fig. 6.

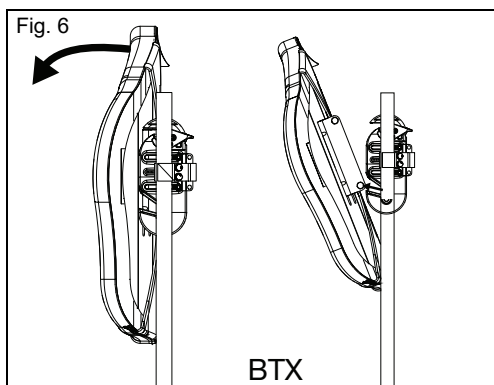


BTX Installer på nytt

1. Installer ryggen på nytt. Se Fig. 7.

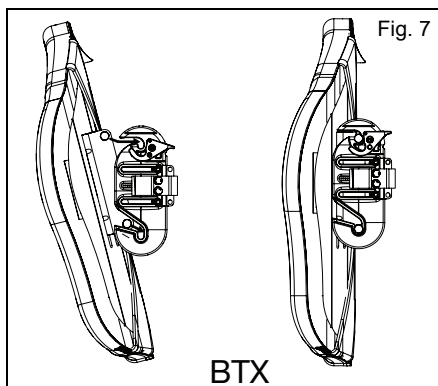

2. Låseprøve: Bekreft visuelt at låsen er låst (Fig. 5). Trekk opp og fremover for å forsikre deg om at ryggen er låst. Se Fig. 8.

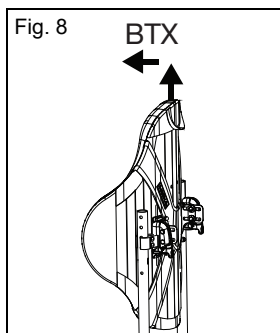


3. Sett tilbake sikkerhetslåsesplinten (Fig. 4:A).


A. Feste og feste på nytt (fortsettelse)

DEX Fjerning

1. Sett låsemekanismen i frigjøringsposisjonen. (Fig. 9).

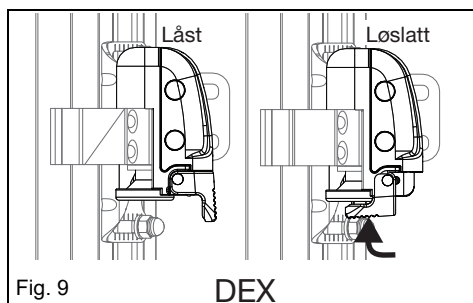


2. Fjern ryggen ved å løfte opp stroppen. Se Fig. 10.

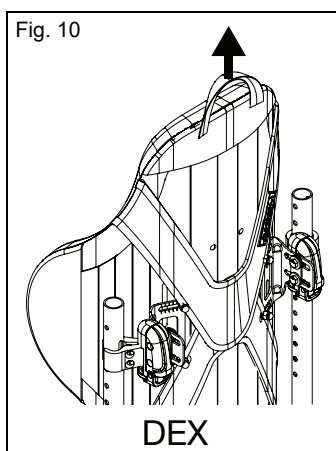


DEX Installer på nytt

1. Installer ryggen på nytt. Se Fig. 11.

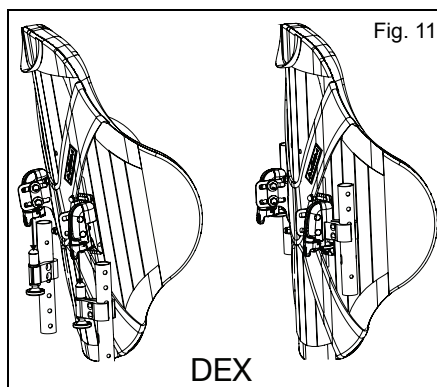

A. Feste og feste på nytt (fortsettelse)

2. Låseprøve: Bekreft visuelt at låsen er låst (Fig. 9). Trekk opp for å forsikre deg om at ryggen er låst. Se Fig. 12.

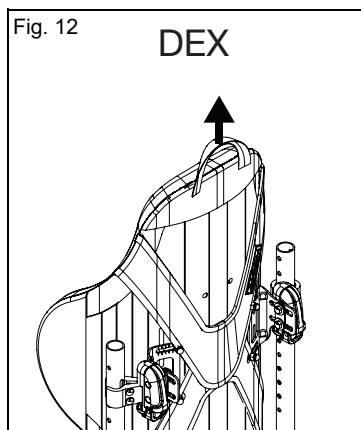

B. Skyve eller løfte

ADVARSEL

ADVARSEL: Ikke bruk Axiom-ryggen for å løfte eller skyve rullestolen.

1. Ikke bruk håndtaket på Axiom-ryggen for å løfte vekten av rullestolen. Det er bare tenkt for å fjerne Axiom-ryggen.
2. Å skyve eller trekke anses som uriktig bruk av Axiom-ryggen og kan føre til at Axiom-ryggen uten forvarsel løsner fra rullestolen. Å ikke følge disse advarslene kan føre til at stolen blir skadet eller forårsake et fall, et velt eller at du mister kontrollen og forårsaker alvorlig skade på brukeren eller andre.

C. Axiom-ryggen og transportsikkerhet

Axiom-ryggen har blitt testet i henhold til de dynamiske testkravene i ANSI/RESNA WC-4, avsnitt 20: Rullestolens setesystemer for bruk i motorkjøretøy eller ISO 16840-4 Rullestolseter – del 4: Seter for bruk i motorkjøretøy. Et komplett system med rullestolramme, sete, sikringsystemer og festing av rullestoler og -passasjerer og et riktig utstyrt motorkjøretøy, som alle har overholdt standardene som er nevnt i dette avsnittet, må være på plass før du bruker en Axiom-rygg i en rullestol som brukes som et sete i et motorkjøretøy.



ADVARSEL: Hvis du ikke følger alle instruksjonene for installasjon, bruk og vedlikehold i denne håndboken i tillegg til transportinstruksjonene nedenfor, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall når du bruker Axiom-ryggen i en rullestol som brukes som et sete i et motorkjøretøy.

1. Hvis det er mulig og gjennomførbart, bør brukeren forflytte seg til OEM-produsentens kjøretøysete og bruke kjøretøyets sikkerhetssele.
2. Avstanden mellom toppen av brukerens skulder og toppen av Axiom-ryggen skal ikke overskride 14 cm (5,5").
3. Rullestolen må være merket som egnet for bruk som et sete i et motorkjøretøy, dynamisk testet til ytelseskravene i ISO-standard 7176-19 og installert, brukt og vedlikeholdt i henhold til produsentens instruksjoner.
4. Hvis det opprinnelige rullestolsetet ble skiftet ut, må det nye setet være godkjent for rullestoltransport, installert og brukt som beskrevet i produsentens instruksjoner.
5. Når du bruker rullestolen som et sete i et motorkjøretøy må brukeren være vendt fremover.
6. Brukeren må bruke et system for sikring og innfesting av rullestoler og -passasjerer som overholder ANSI-RESNA WC-4, avsnitt 18: Sikringsystemer og festing av rullestoler og -passasjerer for bruk i motorkjøretøy eller ISO 10542-1 Tekniske systemer og hjelpemidler for uføre eller funksjonshemmede personer – sikringsystemer og festing av rullestoler og -passasjerer – del 1: Krav og testmetoder for alle systemer og være installert, brukt og vedlikeholdt i henhold til produsentens instruksjoner.
7. Hofte-, brystbelter, skuldersele eller andre beltesystemer eller tilbehør for posisjonering bør ikke brukes eller anses som betryggende sikring av passasjerer, med mindre det er behørig merket av produsenten i henhold til ANSI-RESNA WC-4, avsnitt 18 eller ISO 10542-1, del 1.
8. Hodestøtter, sidestøtter eller annet tilbehør for posisjonering må ikke anses som betryggende sikring av passasjerer, med mindre det er behørig merket av produsenten i henhold til RESNA WC-4, avsnitt 18 eller ISO 10542-1, del 1, eller ANSI/RESNA WC-4, avsnitt 20: Rullestolens setesystemer for bruk i motorkjøretøy eller ISO 16840-4 Rullestolseter – del 4: Seter for bruk i motorkjøretøy.
9. Tilbehør som kjøpes senere, som bord, oksygenflaskeholder, oksygenflasker, IV-stativ, ryggsekker, vesker eller annet tilbehør bør tas av og lagres separat på et egnet sted i kjøretøyet. Hvis det skulle skje en ulykke, kan disse gjenstandene bli farlige prosjektiler som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall for deg eller andre passasjerer i kjøretøyet.
10. Dette produktet er tenkt brukt av voksne med en vekt fra 36 til 136 kg (79 til 300 pund).
11. Dersom Axiom-ryggen har vært involvert i en ulykke bør den ikke brukes, siden det kan ha oppstått usynlig materialtretthet.

D. Vedlikehold

Jevnlig rengjøring og vedlikehold kan bidra til å forlenge Axiom-ryggens levedtid. Du må inspisere Axiom-ryggen hver måned. Det anbefales at komponentene inspiseres under rengjøring.

1. Kontroller om trekket har rifter eller er mye slitt
 - a. Fjern trekket og sjekk at både inn- og utside ser hele og fine ut.
 - b. Sjekk om skumgummien har skader eller er brutt ned.
 - a. Rivninger dypere enn 0,25" (6,35 mm).
 - b. Løse granulater av skum.
 - c. Permanente endringer i den ubelastede skumformen, for eksempel utflating.
2. Kontroller mekanismen for om noe er løst, tegn på ødelagte gjenger, redusert ytelse eller deformering.

ADVARSEL

ADVARSEL: Hvis du finner noe unormalt, slik som dårlig skumgummi eller skader på mekanismer eller festemidler, må du avslutte bruken av produktet med en gang og snakke med din autoriserte Ki Mobility-leverandør. Å ikke gjøre dette kan påvirke hudens integritet som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

ADVARSEL

ADVARSEL: Eieren av dette utstyret er ansvarlig for å sørge for at det har blitt konfigurert og justert av en autorisert Ki Mobility-leverandør etter veiledning fra helsepersonell. Det kan kreve jevnlig sikkerhets- og funksjonskontroller eller visse justeringer under bruk som kan utføres av brukeren, pleiepersonell eller en autorisert Ki Mobility-leverandør.

1. Festemidler: Ki Mobility anbefaler at alle festemidler inspiseres hver sjette måned for å se at de virker som de skal, og at det ikke er løse bolter eller ødelagte komponenter. Løse festemidler skal strammes i henhold til installasjonsinstruksjonene.
2. Bytte komponenter Kontakt med en gang din autoriserte Ki Mobility-leverandør for å bytte eventuelle komponenter. Ikke bruk systemet etter at du finner løse eller ødelagte komponenter.

E. Rengjøring

1. Trekket på Axiom-ryggen


MERK: Tøking med varme kan føre til krymping som påvirker trekkenes passform og funksjon.

- Fjern trekket fra Axiom-ryggen ved å løsne Velcro®-en (borrelåsen). Åpne glidelåsen i bunnen på trekket.
- Rull og fjern skumgummien litt for å vende trekket ut-inn.
- Lukk glidelåsen for å unngå at trekket henger fast.
- Vaskes i maskin i varmt vann (40 °C).
- Tørke på snor eller i tørketrommel med kaldluft.

MERK: Trekkene må ikke renses eller vaskes i industrielle vaskemaskiner eller tørketromler. Må ikke dampautoklaveres. Må ikke blekes. Definisjoner av vaskeanvisningssymboler er vist i fig. 14.

2. Montering av Axiom-ryggen

- Fjern hele ryggmontasjen for å gjøre rengjøringen enklere. Se fig. 13.

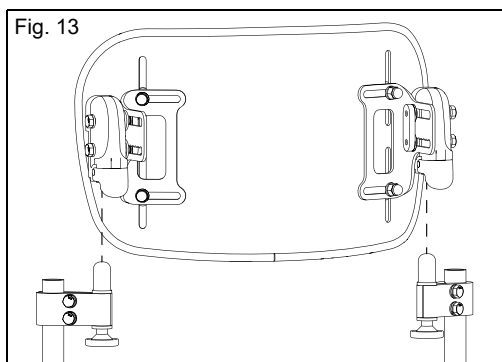

- Axiom-ryggskallet skal jevnlig tørkes rent med såpe og vann for å forhindre at skitt og møkk bygger seg opp.

3. Plasseringskomponenter

- Plasseringskomponenter kan tørkes rene med såpe og vann.
- Plasseringskomponenter må IKKE dyppes under vann.

Instruksjoner for vedlikehold og bruk	
	Maskinvask, varm
	Må ikke blekes
	Tørke på snor eller i tørketrommel med kaldluft
	Må ikke strykes
	Må ikke renses

Fig. 14


F. Sterilisering

Et steriliseringstrinn bør utføres i tillegg til jevnlig rengjøring:

- a. Fjern og vask trekket i henhold til trinn 1a., 1b. og 1c. ovenfor.
- b. Maskinvask trekket kun med varmt vann (60°C).
- c. Drypp og tørk i trommel uten varme.
- d. Desinfiser alle overflater (trekk, skumgummi og ryggmontering) med vanlig desinfiseringsmiddel eller servietter med minst 70% alkohol. Ikke legg rengjøringsmidler i bløt eller la det få danne damper.
- e. La desinfiseringsmidlet være på overflaten i minst 15 minutter, og fjern det med aseptisk klut om nødvendig.

G. Å montere Axiom på nytt etter rengjøring

1. Etter rengjøring
 - a. Sett skumgummien og trekket tilbake på plass. Rull skumgummien litt når du installerer trekket.
2. Reinstallering av ryggmekanismen
 - a. For å feste Axiom-ryggen og meknismens holdere på nytt, rett inn stiftene mot holderne.
 - b. Skyv Axiom-ryggen på plass på holderne.
 - c. Hvis den settes riktig inn, vil pinnene «klikke» inn i låst stilling.

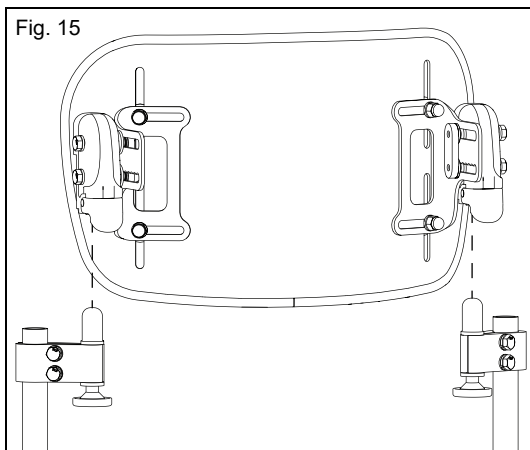

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hvis du er usikker på om du har hørt låsen «klikke», trekker du Axiom-ryggen opp etter håndtaket for å teste og sikre at den er låst som den skal. Å ikke følge denne advarselen kan føre til utstyrsskade, et fall eller at du mister kontrollen og forårsaker alvorlig skade på brukeren eller andre.

KI MOBILITY – BEGRENSET GARANTI

Forventet levetid på produktet er fem år.

A. I 24 måneder

Ki Mobility garanterer at Axiom-ryggen er fri for feil i materialer og fagmessig utførelse i en periode på 24 måneder. Denne begrensede garantien gjelder:

1. Axiom-ryggens skall og skumgummi

Hvis det i en periode på 24 måneder (2 år) fra kjøpsdato, forutsatt normal bruk, oppstår en feil i materialer eller fagmessig utførelse, vil Ki Mobility etter eget valg reparere eller bytte den uten kostnad. Denne garantien gjelder ikke stikkhull, rifter eller forbrenning.

B. I 6 måneder

Ki Mobility garanterer at puten er fri for feil i materialer og fagmessig utførelse i en periode på 6 måneder. Denne begrensede garantien gjelder:

1. Avtakbare trekk

Hvis det i en periode på 6 måneder fra kjøpsdato, forutsatt normal bruk, oppstår en feil i materialer eller fagmessig utførelse, vil Ki Mobility etter eget valg reparere eller bytte den uten kostnad. Denne garantien gjelder ikke stikkhull, rifter eller forbrenning.

C. Begrensninger

1. Vi garanterer ikke:
 - a. Skade fra vanskjøtsel, uhell, feil bruk eller feilaktig installasjon eller reparasjon.
 - b. Produkter som er endret uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Ki Mobility.
 - c. Skade fra at vektgrensen overskrides.
2. Denne garantien er UGYLDIG hvis det opprinnelige Axiom rygg-merket på stolen er fjernet eller endret.
3. Denne garantien er kun gyldig i USA. Kontakt leverandøren din for å finne ut om internasjonale garantier gjelder.
4. Denne garantien kan ikke overføres og gjelder bare første sluttbrukers kjøp av dette produktet gjennom en autorisert Ki Mobility-leverandør.

D. Hva vi vil gjøre

Vårt hovedansvar er å bytte eller reparere deler som er dekket. Dette er det eneste botemiddelet for følgeskader.

E. Hva du må gjøre

1. Selv om garantien gjelder, må du ha forhåndsgodkjenning fra oss for retur eller reparasjon av deler som er dekket.
2. Krav og reparasjoner skal behandles gjennom din nærmeste autoriserte leverandør. Med unntak av uttrykkelige garantier som gis her, er alle andre garantier, inkludert indirekte garantier om salgbarhet og garantier om egnethet for et spesielt formål, utelukket.

F. Merknad til sluttbruker

1. Hvis loven tillater det, erstatter denne garantien alle andre garantier (gitt skriftlig eller muntlig, uttrykkelig eller indirekte, inkludert en garanti om salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål).
2. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som kan variere fra land til land.

Registrer partinummeret ditt her for fremtidig referanse:

AXIOM

by Etac



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991



Autoriserte EU-representant:
Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Sweden



www.kimobility.com



DCN0814.3