

AXIOM

BACKS

AXCB | FB | FL | LB | DL

BEDIENUNGSANLEITUNG & GEWÄHRLEISTUNG



2024-02-15

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf eines Ki Mobility Produkt!

WARNUNG

WARNUNG: Verwenden Sie diesen nicht, ohne vorher das gesamte Handbuch gelesen zu haben. Eine Verwendung ohne vorherige vollständige Lektüre dieses Handbuchs kann zu ernsthaften Verletzungen des Benutzers und/oder des Betreuers führen.

Ki Mobility empfiehlt vor der Verwendung eine Schulung in der sicheren Verwendung dieses Stuhls durch eine Fachperson für assistierende Technologie (Assistive Technology Professional, ATP) oder eine andere kompetente klinische oder technische Fachperson.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu irgendeinem Aspekt dieses Produkt, dieses Handbuchs oder der angebotenen Dienstleistung haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren autorisierten Lieferanten, einen autorisierten Vertreter oder an Ki Mobility zu wenden. Ki Mobility ist erreichbar unter:

(1)715-254-0991



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
USA



www.kimobility.com (Enthält eine Händlersuche und Zugang zu gedruckten Informationen)

Oder über unseren autorisierten EU-Vertreter:




Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Sweden

INHALTSVERZEICHNIS

	Axiom Back Merkmale.....	3
A.	Verwendung.....	4
B.	Ihre Sicherheit	4
C.	Signalwörter	5
D.	Symbolglossar	5
E.	Untersuchen Sie Ihre Haut täglich.....	6
F.	Allgemeine Warnhinweise	6
G.	Positionierung von Gurten	7
H.	Ihren Axiom Back schützen	8
I.	Ausrichtung des Bezugs.....	8
J.	Wegschwenkbare seitliche Stütze.....	9
	Einrichten, Anpassen und Pflege.....	10
A.	Abnehmen und Wiederanbringen	10
B.	Schieben oder Anheben	13
C.	Axiom Back Transitsicherheit.....	14
D.	Wartung	15
E.	Reinigung.....	16
F.	Desinfektion	17
G.	Wiederzusammenbau Ihres Axiom Back nach der Reinigung	17
	KI MOBILITY BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG	18

Axiom Back

Axiom Back Merkmale

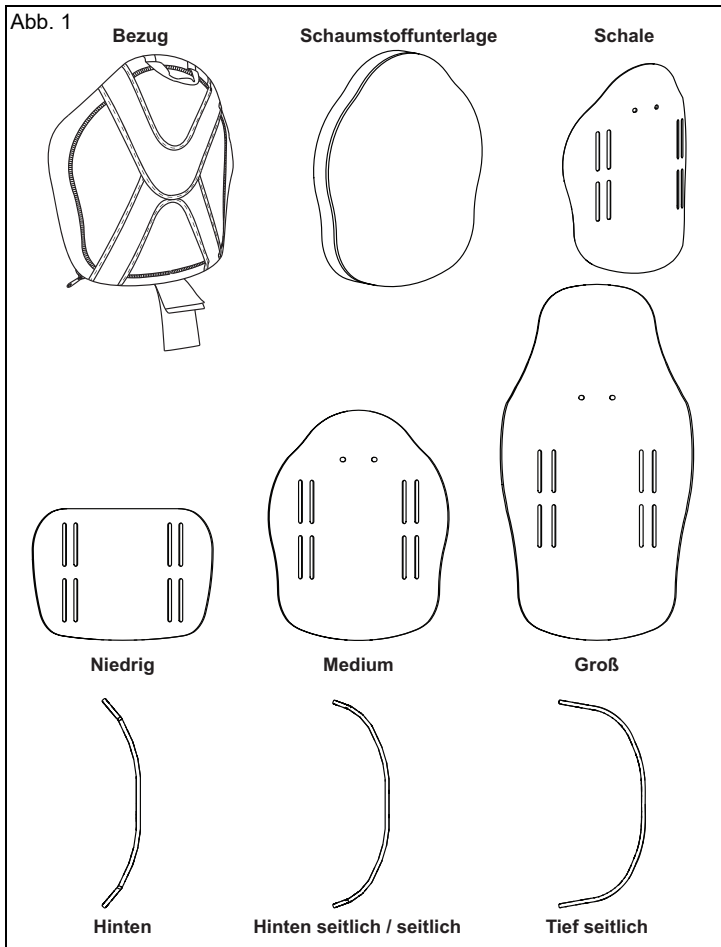

MAXIMALES GEWICHT DES BENUTZERS: 300 lbs (136 kg)

HINWEIS: Die Merkmale des Axiom Custom Rückenteils variieren je nach Bestellung und sind möglicherweise nicht repräsentativ für das, was in Abb. 1 gezeigt wird."

A. Verwendung

Vorgesehene Verwendung: Rollstuhlrückenlehnen von Ki Mobility dienen der Haltungsunterstützung, Druckverteilung und der Verbesserung der Sitztoleranz. Dieser Rollstuhlrückenlehnen ist für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich vorgesehen.

Vorgesehene Benutzer: Diese Rollstuhlrückenlehnen sind für Benutzer mit körperlichen Behinderungen oder Einschränkungen gedacht, die es erfordern, dass sie Zeit in einer sitzenden Position verbringen müssen; in der Regel in Rollstühlen, jedoch nicht beschränkt auf diese. Die Benutzer können bei der Nutzung des Rollstuhls zur Mobilität entweder abhängig oder unabhängig sein.

Indikationen zur Verwendung: Es besteht ein Bedarf an unterstützter Sitzpositionierung während der Mobilität auf Rädern, den die Rückenlehne des spezifischen Modells erfüllen kann, wie vom Benutzer, den Pflegekräften, den Klinikern und dem Assistive Technology Professional (ATP) oder einer anderen kompetenten klinischen oder technischen Fachkraft mit entsprechenden Kenntnissen der in Frage kommenden Produkte festgestellt.

Kontraindikationen zur Verwendung: Es besteht eine Unfähigkeit der Rückenlehne des spezifischen Modells, die Bedürfnisse des Benutzers zu erfüllen, wie vom Benutzer, den Pflegekräften, den Klinikern und dem Assistive Technology Professional (ATP) oder einer anderen kompetenten klinischen oder technischen Fachkraft mit entsprechender Kenntnis der in Frage kommenden Produkte festgestellt.

B. Ihre Sicherheit

Alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse oder Verletzungen im Zusammenhang mit der Benutzung Ihres produkt oder dessen Zubehör müssen sofort gemeldet werden, wenn der Vorfall direkt oder indirekt zu einer schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung oder zum Tod des Benutzers oder einer anderen Person führt. Melden Sie Ki Mobility alle schwerwiegenden Ereignisse und/oder Verletzungen, und, falls durch örtliche Vorschriften vorgeschrieben, der zuständigen Gesundheitsbehörde, bei welcher der Benutzer und/oder eine andere Person ihren rechtmäßigen Wohnsitz hat.

Verwenden Sie diesen produkt nicht, ohne vorher das gesamte Handbuch gelesen zu haben. VOR der Fahrt sollten Sie von einer Fachperson für Hilfsmitteltechnologie (Assistive Technology Professional, ATP) oder einer anderen kompetenten klinischen oder technischen Fachkraft im sicheren Umgang mit diesem Stuhl geschult werden. Ki Mobility stellt viele verschiedene produkt her, die Ihren Ansprüchen gerecht werden. Die anerkannte beste Praxis für die Auswahl eines produkt besteht darin, sich mit einem ATP oder einer anderen kompetenten technischen Fachperson und einer erfahrenen klinischen Fachperson wie einem Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder Arzt zu beraten. Die endgültige Auswahl des produkt, der Optionen und Einstellungen liegt allein bei Ihnen und Ihrem technischen und klinischen Fachpersonal.

C. Signalwörter

In diesem Handbuch finden Sie sogenannte "Signal"-Wörter. Durch diese Wörter wird das Ausmaß verschiedener Gefahren identifiziert und vermittelt. Bevor Sie diesen Rollstuhl benutzen, sollten Sie und alle Personen, die Sie gegebenenfalls unterstützen, dieses gesamte Handbuch lesen. Bitte beachten Sie das Signalwort und beachten Sie alle Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen oder Warnungen. Halten Sie sich unbedingt an alle Anweisungen und benutzen Sie Ihren Rollstuhl sicher. Die Signalwörter weisen auf eine Gefahr oder unsichere Verwendungsweise hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Ihnen oder anderen Personen führen kann. Die "Warnungen" gliedern sich in folgende drei Hauptkategorien:

HINWEIS – "Hinweis" weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu einer Verschlechterung der Leistung des Rollstuhl führen könnte.



VORSICHT: "Vorsicht" weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden an Ihrem Rollstuhl und Verletzungen bei Ihnen führen kann.



WARNUNG: "Warnung" weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Diese Signalwörter werden im gesamten Handbuch platziert, um gegebenenfalls auf die Gefahrensituation hinzuweisen. Siehe Abschnitt G. für gefährliche Situationen, die für den allgemeinen Gebrauch dieses Rollstuhls gelten.

D. Symbolglossar

SYMBOL	DEFINITION
	Gibt den Hersteller des medizinischen Geräts an.
	Herstellungsdatum (YEAR/MM/DD).
	Wenn dieses Symbol auf der Verpackung, dem Medizinprodukt oder in der Gebrauchsanweisung abgebildet ist, weist es darauf hin, dass der Benutzer die Vorsichtsmaßnahmen oder Warnhinweise lesen und verstehen muss, um Schädigungen oder Verletzungen zu vermeiden.
	Zeigt an, dass der Artikel ein medizinisches Gerät ist.
	Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes medizinisches Gerät identifiziert werden kann.
	Gibt den autorisierten Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft an.
	Kennzeichnet die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien erfüllt.
	Weist darauf hin, dass der Benutzer die Anweisungen zu Rate ziehen muss.
	Weist darauf hin, dass der Benutzer die angeführte Website für Anweisungen zur Verwendung in einem elektronischen Format beachten muss.
	Gibt eine Website an, auf der ein Benutzer zusätzliche Informationen über das Medizinprodukt erhalten kann.
	Zeigt eine bestimmte maximale Gewichtsgrenze an (lbs/kg).
	Zeigt einen Transit-Befestigungspunkt an.
	Zeigt eine mögliche Quetschstelle an.
	Gibt das Unternehmen, bzw. die Organisation an, welche das medizinische Gerät in die Region importiert.
	Gibt den Chargencode des Herstellers an, damit die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
	Maschinenwaschbar, heiß
	Nicht bleichen
	Auf der Leine oder im Wäschetrockner trocknen, keine Hitze
	Nicht bügeln
	Keine chemische Reinigung

E. Untersuchen Sie Ihre Haut täglich

Axiom Sitz- und Positionierungsprodukte sind so konzipiert, dass sie die Druckverteilung verbessern und die Sitztoleranz erhöhen. Ob der bereitgestellte Axiom Back Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, kann nicht im Voraus garantiert werden. Die Unversehrtheit Ihrer Haut kann durch viele Aspekte Ihres täglichen Lebens und Ihres Gesundheitszustands beeinträchtigt werden, auch durch die Verwendung dieses Produkts. Achten Sie darauf, die von Ihrem Arzt festgelegte Hautpflege einzuhalten.

Benutzer dieses Produkts sollten sicherstellen, dass ihre Haut täglich auf Veränderungen untersucht wird. Wenn Sie Veränderungen feststellen, stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein und konsultieren Sie Ihren Kliniker. Ein wichtiger klinischer Indikator für Gewebeschäden ist Hautrötung. Wenn Ihre Haut Rötungen entwickelt, stellen Sie die Anwendung dieses Produkts sofort ein und konsultieren Sie Ihren Kliniker.



WARNUNG: Das Versäumnis, einen Axiom Back auszuwählen, der zu Ihrem Rollstuhl passt, kann zu Hautschäden, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



WARNUNG: Das Versäumnis einer gründlichen Hautinspektion oder die weitere Verwendung eines Axiom Back nach Hautveränderungen kann Hautschäden verursachen und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

F. Allgemeine Warnhinweise



WARNUNG: Verwenden oder installieren Sie dieses Axiom Back nicht, ohne vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden zu haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten Ki Mobility Lieferanten oder Ihren Kliniker, wenn Sie die Warnhinweise und Anleitung nicht verstehen können. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.



WARNUNG: Das Anbringen eines Axiom Back auf einem Rollstuhl könnte den Schwerpunkt des Rollstuhls beeinflussen. Änderungen Ihres Schwerpunkts können Ihre Stabilität im Rollstuhl beeinträchtigen und zum Umkippen oder Sturz aus dem Rollstuhl führen, was zu schweren Verletzungen führen kann. Überprüfen Sie immer die Gebrauchsanleitung Ihres Rollstuhls, um festzustellen, ob Änderungen am Rollstuhl erforderlich sind, um nach dem Anbringen eines Axiom Back eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.



WARNUNG: Die Unversehrtheit Ihrer Haut kann durch viele Aspekte Ihres täglichen Lebens und Ihres Gesundheitszustands beeinträchtigt werden, auch durch die Verwendung dieses Produkts. Achten Sie darauf, die von Ihrem Arzt festgelegte Hautpflege einzuhalten. Benutzer dieses Produkts sollten sicherstellen, dass ihre Haut routinemäßig nach Anweisung ihres Arztes auf Veränderungen untersucht wird. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

G. Positionierung von Gurten

WARNUNG

WARNUNG: Die unsachgemäße Verwendung von Positionierungsgurten kann dazu führen, dass der Benutzer im Rollstuhl unter den Positionierungsgurt rutscht. Sollte dies geschehen, kann es zu einer Kompression des Brustkorbs oder zu Erstickung durch den Druck des Gurtes kommen. Wenn dies geschieht, kann die Atmung des Benutzers behindert werden, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

WARNUNG

WARNUNG: Unsachgemäße Verwendung von Positionierungsgurten kann dazu führen, dass sich Körperteile verfangen und das Bewegungsvermögen eingeschränkt wird, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Ki Mobility empfiehlt die Verwendung von Beckengurten. Positionierungsgurte können das Risiko eines Sturzes aus dem Rollstuhl verringern.

Positionierungsgurte wie Positionierungsgurte und Auffanggurte und Bänder für den vorderen Rumpf, sind so konzipiert, dass sie die korrekte Positionierung und Körperhaltung im Rollstuhl unterstützen, halten und fördern.

- Achten Sie darauf, dass der Benutzer im Rollstuhlsitz nicht unter den Positionierungsgurt rutscht.
- Der Positionierungsgurt sollte fest sitzen; fest genug, um ihre Position zu halten, aber nicht so fest, dass die Atmung eingeschränkt wird. Eine flache Hand sollte zwischen den Gurt und den Benutzer passen.
- Die richtige Verwendung von Kissen kann zur Beckenstabilität beitragen und das Rutschen verhindern.
- Verwenden Sie Positionierungsgurte NIEMALS:
 - a. Als Fixierung. Eine Fixierung erfordert eine ärztliche Anordnung. Es sei denn, Sie können die Gurte im Notfall leicht entfernen. Wenn Sie dies nicht tun können, wenden Sie sich an Ihren Gesundheitsberater, um andere Möglichkeiten zur Unterstützung Ihrer Körperhaltung in Erfahrung zu bringen.
 - b. Bei einem Benutzer, der bewusstlos oder unruhig ist.
 - c. Als Insassenrückhaltesystem oder Sicherheitsgurt in einem Kraftfahrzeug. Ein Positionierungsgurt ist nicht dazu bestimmt, einen Sicherheitsgurt zu ersetzen, der am Rahmen eines Fahrzeugs befestigt ist, was für einen wirksamen Sicherheitsgurt erforderlich wäre. Bei einem plötzlichen Stopp würde der Benutzer mit der Kraft des Stopps nach vorne geschleudert werden. Rollstuhlsitzgurte können dies nicht verhindern, und weitere Verletzungen können durch die Gurte oder Bänder entstehen. Siehe Abschnitt "Transit" dieses Handbuchs für weitere Informationen.

H. Ihren Axiom Back schützen

Vermeiden Sie eine längere Belastung durch ungünstige Umwelteinflüsse. Dies kann eine übermäßige Belastung durch Sonnenlicht und heiße oder kalte Temperaturen beinhalten. Dies kann zu einer Verschlechterung der Leistung Ihres Axiom Back führen.



WARNUNG

WARNUNG: Wenn Sie Ihren Axiom Back nicht schützen, kann dies zu Veränderungen führen, was zu Hautschäden und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.

Obwohl Ihr Axiom Back gemäß den gekennzeichneten Entflammbarkeitsstandards hergestellt wurde, sollten Sie vermeiden, Ihr Kissen offenen Flammen oder extremen Hitzequellen wie einer brennenden Zigarette auszusetzen. Dies kann dazu führen, dass sich Ihr Kissen entzündet oder schädliche Gase freisetzt.




WARNUNG

WARNUNG: Wenn Sie Ihren Axiom Back nicht vor extremer Hitze schützen, kann sich Ihr Axiom Back entzünden oder schädliche Gase freisetzen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

I. Ausrichtung des Bezugs

Ihr Axiom Back wurde so konzipiert, dass er in einer bestimmten Ausrichtung sitzt, und er muss ordnungsgemäß in Ihrem Rollstuhl platziert werden, wobei der Bezug mit der Schaumstoffunterlage korrekt ausgerichtet sein muss. Sie ist beschriftet, um die richtige Ausrichtung anzuzeigen. Siehe Abb. 2.

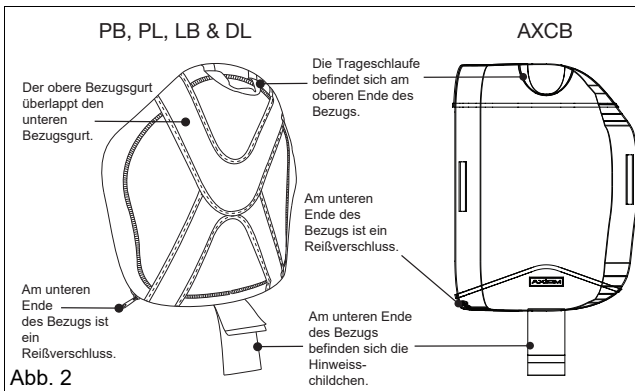


WARNUNG

WARNUNG: Wenn Sie das Kissen und den Bezug des Axiom Back nicht richtig ausrichten, kann dies Hautschäden verursachen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

J. Wegschwenkbare seitliche Stütze

Verwenden

1. Drücken Sie die rote Taste am wegschwenkbaren Seitengelenk ein. Schwenken Sie die seitliche Stütze an die gewünschte Stelle.

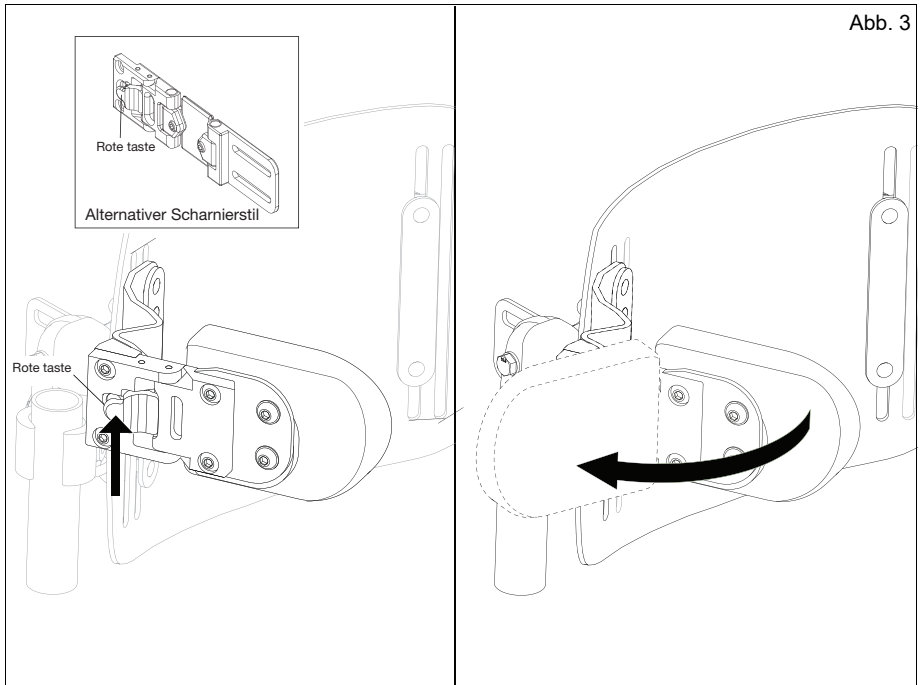


2. Bringen Sie den seitlichen Rückenteil wieder in die Standardposition und stellen Sie sicher, dass es "klickt" oder dass er "einrastet."

Einrichten, Anpassen und Pflege


A. Abnehmen und Wiederanbringen

Identifizieren Sie den Hardwaretyp

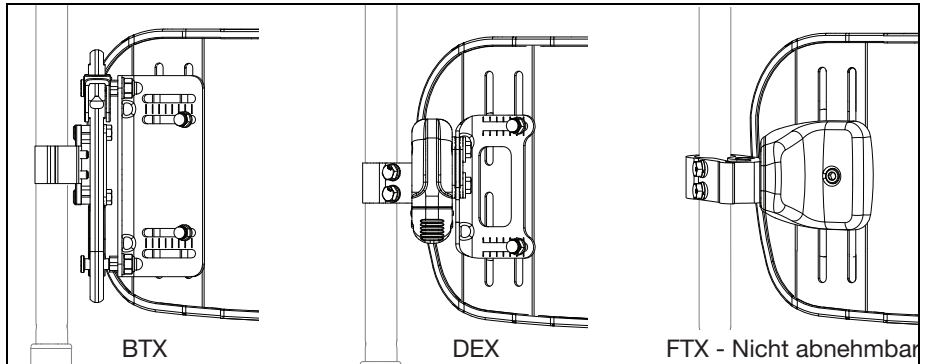


BTX Entfernung

1. BTX - Entfernen Sie den Sicherungsstift (Abb. 4:A).

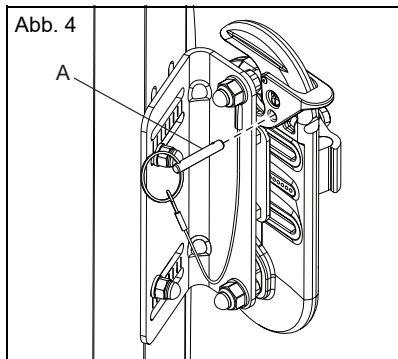


2. Stellen Sie den Verriegelungsmechanismus in die Freigabe position (Abb. 5).

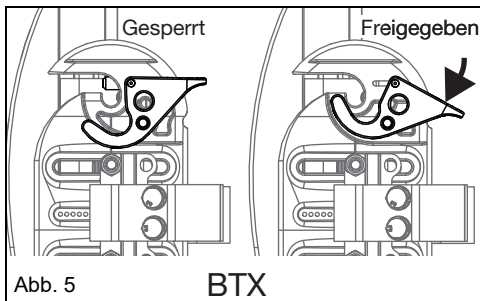


A. Abnehmen und Wiederanbringen (Fortsetzung)

3. Nach vorne ziehen und entfernen, wobei der untere Einschub zuerst herauskommt. Siehe Abb. 6.

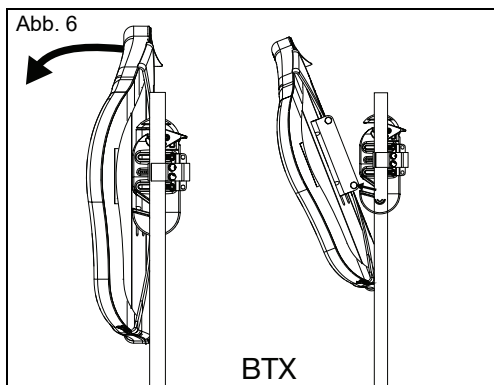


BTX Wiederanbringen

1. Bringen Sie die Rückseite wieder an. Siehe Abb. 7.

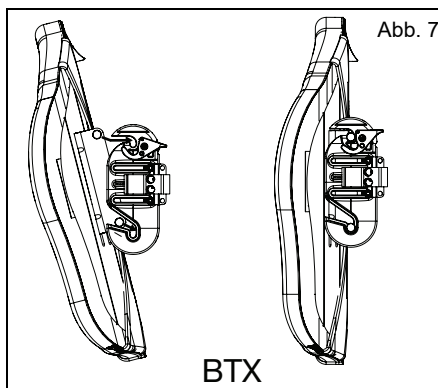

2. Verriegelungstest: Überprüfen Sie visuell, ob die Verriegelung verriegelt ist (Abb. 5). Ziehen Sie nach oben und nach vorne, um sicherzustellen, dass die Rückseite verriegelt ist. Siehe Abb. 8.

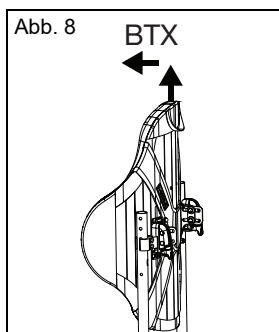


3. Sicherungsstift wieder einsetzen. (Abb. 4:A).


A. Abnehmen und Wiederanbringen (Fortsetzung)

DEX Entfernung

1. Stellen Sie den Verriegelungsmechanismus in die Freigabeposition (Abb. 9).

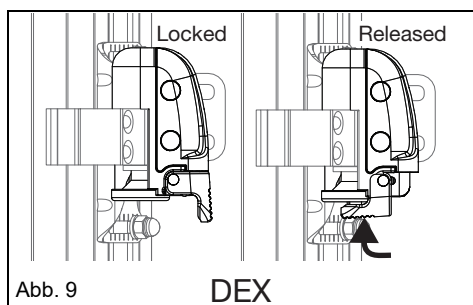


2. Entfernen Sie die Rückseite, indem Sie den Gurt anheben. Siehe Abb. 10.

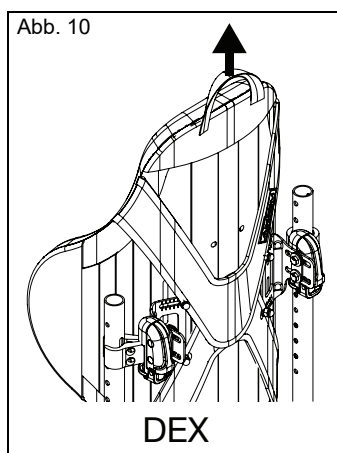


DEX Wiederanbringen

1. Bringen Sie die Rückseite wieder an. Siehe Abb. 11.

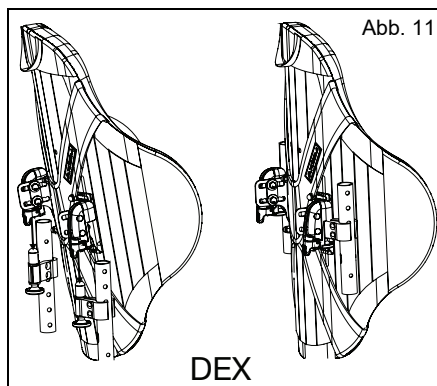

A. Abnehmen und Wiederanbringen (Fortsetzung)

2. Verriegelungstest: Überprüfen Sie visuell, ob die Verriegelung verriegelt ist (Abb. 9). Nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass die Rückseite verriegelt ist. Siehe Abb. 12.

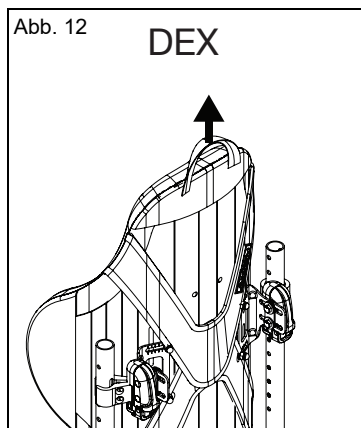

B. Schieben oder Anheben



WARNUNG: Verwenden Sie den Axiom Back nicht zum Anheben oder Schieben des Rollstuhls.

1. Verwenden Sie den Griff des Axiom Back nicht, um das Gewicht des Rollstuhls zu heben. Er ist nur für die Entfernung des Axiom Back vorgesehen.
2. Schieben oder Ziehen gilt als unsachgemäße Verwendung des Axiom Back und kann dazu führen, dass sich der Axiom Back unerwartet vom Rollstuhl löst. Bei Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann Ihr Stuhl beschädigt werden, oder es kann zu einem Sturz, Umkippen oder Kontrollverlust kommen, was zu schweren Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen kann.

C. Axiom Back Transitsicherheit

Der Axiom Back wurde gemäß den dynamischen Testanforderungen von ANSI/RESNA WC-4, Abschnitt 20 getestet: Rollstuhlsitzsysteme zur Verwendung in Kraftfahrzeugen oder ISO 16840-4 Rollstuhlsitz -- Teil 4: Sitzsysteme für den Gebrauch in Kraftfahrzeugen. Vor der Verwendung eines mit Axiom Back ausgestatteten Rollstuhls als Sitz in einem Kraftfahrzeug, sollte ein komplettes System aus Rollstuhlrahmen, Sitzgelegenheiten, Rollstuhlverankerungs- und Insassenrückhaltesystemen sowie ein ordnungsgemäß ausgestattetes Kraftfahrzeug vorhanden sein, die alle den in diesem Abschnitt genannten Normen entsprechen.



WARNUNG: Die Nichtbeachtung jeglicher Anleitungen zur Installation, Verwendung und Wartung innerhalb dieses Handbuchs sowie der unten aufgeführten Transitanleitungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn der Axiom Back in einem Rollstuhl verwendet wird, der als Sitz in einem Kraftfahrzeug verwendet wird.

1. Soweit möglich und durchführbar, sollte der Rollstuhlbenutzer auf den Fahrzeugsitz des Erstausrüsters umsteigen und die Fahrzeugrückhaltesysteme benutzen.
2. Der Abstand zwischen der Oberkante der Schulter des Benutzers und der Oberkante des Axiom Back sollte 14 cm (5,5") nicht überschreiten.
3. Der Rollstuhl muss als für die Verwendung als Sitz in einem Kraftfahrzeug geeignet gekennzeichnet sein, nach den Leistungsanforderungen der ISO-Norm 7176-19 dynamisch getestet und gemäß den Anleitungen des Herstellers eingebaut, benutzt und gewartet werden.
4. Wenn der ursprüngliche Rollstuhlsitz ersetzt wurde, muss der neue Sitz für den Rollstuhltransit zugelassen, installiert und verwendet werden, wie in den Anleitungen des Herstellers angegeben.
5. Wenn Sie Ihren Rollstuhl als Sitz in einem Kraftfahrzeug benutzen, muss sich der Rollstuhlbenutzer in einer nach vorne gerichteten Position befinden.
6. Der Fahrer muss ein "Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint System" verwenden, das ANSI-RESNA WC-4, Abschnitt 18 entspricht: Rollstuhlverankerungs- und Insassenrückhalte-Systeme zur Nutzung in Kraftfahrzeugen oder ISO 10542-1 Technische Systeme und Hilfen für Behinderte – Rollstuhlverankerungs- und Insassenrückhalte-Systeme -- Teil 1: Requirements and test methods for all systems" entspricht, und nach Anleitungen des Herstellers installiert, verwendet und gewartet wird.
7. Die Verwendung von Beckengurten, Brustgurten, Schultergurten, sonstigen Positionierungsgurten oder Positionierungszubehör darf nicht als Insassenrückhaltesystem verwendet werden, es sei denn, es ist vom Hersteller gemäß RESNA WC-4, Abschnitt 18 oder ISO 10542-1, Teil 1 als solches gekennzeichnet.

C. Axiom Back Transitsicherheit (Forts.)

8. Die Verwendung von Kopfstützen, seitlichen Stützen oder anderen Positionierungszubehörteilen darf nicht als Insassenrückhaltesystem verwendet werden, es sei denn, es ist vom Hersteller gemäß RESNA WC-4, Abschnitt 18 oder ISO 10542-1, Teil 1 oder RESNA WC-4, Abschnitt 20: Rollstuhlsitzsysteme zur Verwendung in Kraftfahrzeugen oder ISO 16840-4 Rollstuhlsitz -- Teil 4: Sitzsysteme für den Gebrauch in Kraftfahrzeugen.
9. Aftermarket-Zubehör wie Ablagen, Sauerstofftankhalter, Sauerstoffflaschen, IV-Stangen, Rucksäcke, Beutel und andere Gegenstände sollten entfernt und separat im Kraftfahrzeug gesichert werden. Bei einem Unfall können diese Gegenstände zu gefährlichen Projektilen werden, die Sie oder andere Insassen des Kraftfahrzeugs verletzen oder töten können.
10. Dieses Produkt ist zur Verwendung durch Erwachsene mit einem Gewicht von 36 bis 136 kg (79 bis 300 lb.) bestimmt.
11. Wenn der Axiom Back in einen Unfall verwickelt war, sollten Sie ihn nicht weiter benutzen, da er möglicherweise eine nicht sichtbare Belastung erlitten hat.

D. Wartung

Regelmäßige Reinigung und Wartung kann dazu beitragen, die Lebensdauer Ihres Axiom Back zu verlängern. Sie sollten Ihren Axiom Back monatlich überprüfen. Während der Reinigung wird eine Inspektion der Komponenten empfohlen.

1. Prüfen Sie den Bezug auf Risse und übermäßige Abnutzung
 - a. Entfernen Sie den Bezug und überprüfen Sie ihn auf Auffälligkeiten (innen und außen).
 - b. Prüfen Sie den Schaum auf Zerfall oder Abnutzung.
 - c. Dauerhafte Veränderungen der unbelasteten Schaumform, wie z. B. Abflachung.
2. Überprüfen Sie die Beschlagteile auf Lockerheit, Anzeichen von Ablösungen, Degradation oder Deformationen.



WARNUNG: Wenn Sie irgendwelche Auffälligkeiten feststellen, wie z.B. Schaumstoffbruch oder Schäden an den Beschlagteilen oder den Befestigungselementen, stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Ki Mobility Lieferanten. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies Hautschäden verursachen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



WARNUNG: Der Eigentümer dieses Geräts ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass es von einem autorisierten Ki Mobility Lieferanten unter Anleitung einer medizinischen Fachperson eingerichtet und eingestellt wurde. Möglicherweise sind regelmäßige Sicherheits- und Funktionsprüfungen oder bestimmte Betriebseinstellungen, die vom Benutzer, der Pflegekraft oder einem autorisierten Ki Mobility Lieferanten durchgeführt werden können, notwendig.

1. Befestigungselemente: Ki Mobility empfiehlt, alle Befestigungselemente alle sechs Monate auf ihre ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen, z.B. auf lose Schrauben oder beschädigte Komponenten. Lose Befestigungselemente sollten gemäß den Installationsanleitungen neu angezogen werden.
2. Ersetzen von Komponenten: Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren autorisierten Ki Mobility Lieferanten, um Komponenten auszutauschen. Stellen Sie die Verwendung des Systems ein, nachdem Sie lose oder beschädigte Komponenten identifiziert haben.

E. Reinigung

1. Axiom Back Bezug


HINWEIS: Das Trocknen mit Hitze kann zu Schrumpfungen führen, die die Passform und Funktion der Bezüge beeinträchtigen.

- Entfernen Sie den Bezug von Axiom Back, indem Sie den Velcro®-Klettverschluss lösen. Öffnen Sie den Reißverschluss an der Unterseite des Bezugs.
- Den Schaumstoff leicht rollen und entfernen, um den Bezug von innen nach außen zu wenden.
- Schließen Sie den Bezug mit dem Reißverschluss, um ein Verhaken zu vermeiden.
- Maschinenwäsche in warmem Wasser (60°C).
- Hitzefrei abtropfen und im Trockner trocknen lassen.

HINWEIS: Bezüge nicht chemisch reinigen und verwenden Sie zur Reinigung der Bezüge keine industriellen Waschmaschinen oder Trockner. Nicht dampfautoklavieren. Nicht bleichen. Die Definitionen der Wäschepflegesymbole sind in Abb. 14 dargestellt.

2. Axiom Back Teile

- Entfernen Sie die gesamte hintere Baugruppe, um die Reinigung zu erleichtern. Siehe Abb. 13.

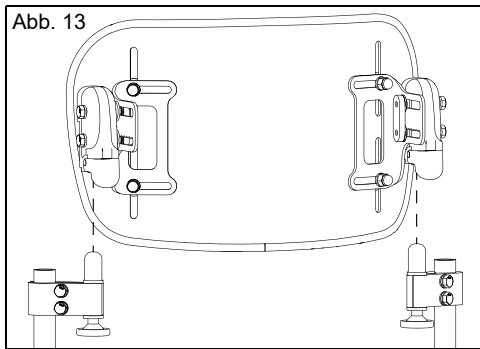

- Die Schale des Axiom Back sollte regelmäßig mit Wasser und Seife abgewischt werden, um die Ansammlung von Schmutz und Verunreinigungen zu verhindern.

3. Positionierungskomponenten

- Positionierungskomponenten können mit Seife und Wasser abgewischt werden.
- Positionierungskomponenten NICHT unter Wasser tauchen.

Pflege- und Gebrauchsanleitungen	
	Maschinenwaschbar, 60°C
	Nicht bleichen
	Im Trockner trocknen, normal, keine Hitze
	Nicht bügeln
	Keine chemische Reinigung

Abb. 14


F. Desinfektion

Der Desinfektionsschritt sollte zusätzlich zur regelmäßigen Reinigung durchgeführt werden:

- a. Entfernen Sie den Bezug und waschen Sie ihn gemäß den Schritten 1a., 1b., & 1c. oben.
- b. Waschen Sie den Bezug in der Maschine nur in heißem Wasser (60°C).
- c. Abtropfen und im Trockner ohne Hitze trocknen lassen.
- d. Desinfizieren Sie alle Oberflächen (Bezug, Schaumstoff und Rückenteil) mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel mit mindestens 70 % Alkohol oder Desinfektionstüchern. Nicht durchnässen und auch nicht Reinigungslösungen in Pfützen ansammeln lassen.
- e. Lassen Sie das Desinfektionsmittel mindestens 15 Minuten lang auf die Oberfläche einwirken und entfernen Sie es mit einem sterilen Tuch falls erforderlich.

G. Wiederausammenbau Ihres Axiom Back nach der Reinigung

1. Nach der Reinigung
 - a. Schaumstoff und Bezug wieder anbringen. Rollen Sie den Schaumstoff beim Anbringen des Bezugs leicht auf.
2. Wiederanbringen der Rückenteile
 - a. Um den Axiom Back und die Rezipienten der Beschlagteile wieder anzubringen, richten Sie die Stifte an den Rezipienten aus.
 - b. Schieben Sie den Axiom Back auf die Rezipienten.
 - c. Wenn sie richtig eingesetzt werden, "klicken" die Stifte in eine verriegelte Position.

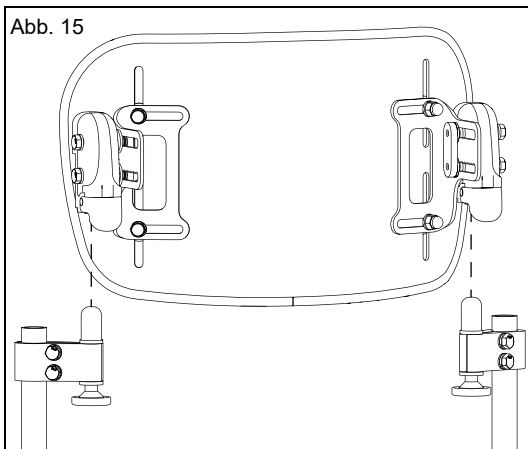

⚠️ WARNUNG ⚠️

WARNUNG: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das "Klicken" der Verriegelung gehört haben, ziehen Sie den Axiom Back mit dem Griff nach oben, um zu testen und sicherzustellen, dass er sicher verriegelt ist. Wenn Sie diese Warnung nicht beachten, kann es zu Schäden an Ihrem Gerät, zu einem Sturz oder zum Verlust der Kontrolle kommen, und zu schweren Verletzungen des Rollstuhlbenutzers oder anderer Personen führen.

KI MOBILITY BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

Die erwartete Lebensdauer des Rahmens beträgt fünf Jahre.

A. Für 24 Monate

Ki Mobility gewährleistet, dass der Axiom Back für einen Zeitraum von 24 Monaten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese beschränkte Gewährleistung gilt für:

1. Axiom Back Schale und Schaumstoff

Für einen Zeitraum von 24 Monaten (2 Jahre) ab Kaufdatum, bei normalem Gebrauch, repariert oder ersetzt Ki Mobility das Gerät nach eigenem Ermessen kostenlos, falls ein Material- oder Verarbeitungsfehler auftritt. Diese Gewährleistung gilt nicht für Puncturen, Risse oder Brandschäden.

B. Für 6 Monate

Ki Mobility gewährleistet, dass das Kissen für einen Zeitraum von 6 Monaten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese beschränkte Gewährleistung gilt für:

1. Abnehmbare Bezüge

Für einen Zeitraum von 6 Monaten ab Kaufdatum, bei normalem Gebrauch, repariert oder ersetzt Ki Mobility diese nach eigenem Ermessen kostenlos, falls ein Material- oder Verarbeitungsfehler auftritt. Diese Gewährleistung gilt nicht für Puncturen, Risse oder Brandschäden.

C. Beschränkungen

1. Wir übernehmen keine Gewährleistung für:
 - a. Schäden, die durch Vernachlässigung, Missbrauch oder durch unsachgemäßes Anbringen oder Reparatur entstehen.
 - b. Produkte, die ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Ki Mobility verändert wurden.
 - c. Schäden durch Überschreiten der Gewichtsgrenze.
2. Diese Gewährleistung ist UNGÜLTIG, wenn der originale Axiom Back Aufkleber entfernt oder verändert wird.
3. Diese Gewährleistung gilt nur in den USA. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten, ob internationale Gewährleistungen gelten.
4. Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den Kauf durch den ersten Verbraucher dieses Produkts über einen autorisierten Ki Mobility Lieferanten.

D. Was wir tun werden

Unsere einzige Haftung besteht in der Reparatur oder dem Austausch der Teile, die unter die Garantie fallen. Dies ist der ausschließliche Rechtsbehelf für Folgeschäden.

E. Was Sie tun müssen

1. Holen Sie von uns, solange diese Gewährleistung in Kraft ist, eine vorherige Genehmigung für die Rücksendung oder Reparatur der Teile ein, die unter die Garantie fallen.
2. Reklamationen und Reparaturen sollten über den nächstgelegenen autorisierten Lieferanten abgewickelt werden. Mit Ausnahme der hierin enthaltenen ausdrücklichen Gewährleistungen sind alle anderen Gewährleistungen, einschließlich impliziter Garantien der Marktgängigkeit und Gewährleistungen der Eignung für einen bestimmten Zweck, ausgeschlossen.

F. Hinweis für Verbraucher

1. Soweit gesetzlich zulässig, tritt diese Gewährleistung an Stelle jeder anderen Gewährleistung (schriftlich oder mündlich, ausdrücklich oder implizit, einschließlich einer Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck).
2. Diese Gewährleistung gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

AXIOM

by Etac



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991



Authorized EU Representative:
Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Sweden



www.kimobility.com



DCN0748.4