

AXIOM

for Kids

BACKS

PXPL | PXAL | PXAL CL

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG &
GEWÄHRLEISTUNG



DE - EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf eines Ki Mobility-Produkts!



WARNUNG

WARNUNG: Verwenden Sie diesen nicht, ohne vorher das gesamte Handbuch gelesen zu haben. Eine Verwendung ohne vorherige vollständige Lektüre dieses Handbuchs kann zu ernsthaften Verletzungen des Benutzers und/oder des Betreuers führen.

Ki Mobility empfiehlt vor der Verwendung eine Schulung durch eine Fachperson für assistierende Technologie (Assistive Technology Professional, ATP) oder eine andere kompetente klinische oder technische Fachperson in der sicheren Verwendung dieses Stuhls.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu irgendeinem Aspekt dieses Rollstuhls, dieses Handbuchs oder der angebotenen Dienstleistung haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren autorisierten Lieferanten, einen autorisierten Vertreter oder an Ki Mobility zu wenden. Ki Mobility ist erreichbar unter:

(1) 715-254-0991



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A.



www.kimobility.com (Enthält Händler Suchfunktion und Zugang zu gedruckten Informationen)

Oder über unseren autorisierten EU-Vertreter:



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp
Sweden

Oder über unsere zuständige Person im Vereinigten Königreich:



Etac Ltd
Unit 60, Hartlebury Trading
Estate, Hartlebury
Kidderminster, DY10 4JD

INHALTSVERZEICHNIS

DE - EINLEITUNG	1
A. Vorgesehene Verwendung	2
B. Ihre Sicherheit	2
C. Signalwörter	2
D. Symbolglossar	2
E. Untersuchen Sie Ihre Haut täglich	2
F. Allgemeine Warnhinweise	3
G. Ihr Axiom-Rückenteil schützen	3
H. Ausrichtung des Bezugs	3
Einrichten, Anpassen und Pflege	4
A. Abnehmen und Wiederanbringen der Rückenlehne	4
B. Wegschwenkbare seitliche Stütze - Betätigung	4
C. Schieben oder Anheben	4
D. Axiom-Rückenteil Transitsicherheit	4
E. Wartung	5
F. Reinigung	5
G. Desinfektion	6
H. Wiederausammenbau Ihres Axiom-Rückenteils nach der Reinigung	6
KI MOBILITY BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG	7

Axiom K Pediatric Rückenteil

WICHTIGE ENDVERBRAUCHERINFORMATIONEN

HINWEIS: Dieses Handbuch enthält Anleitungen zur Verwendung mit den Ki Mobility Back Produkten. Diese Informationen müssen dem Endverbraucher dieses Produkts zur Verfügung gestellt werden. Entfernen Sie dieses Handbuch nicht vor der Auslieferung an den Endverbraucher dieses Produkts.


Lieferant: Dieses Handbuch muss dem Endverbraucher dieses Produkts zur Verfügung gestellt werden.

Endverbraucher: Lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch vor der Verwendung dieses Produkts und bewahren Sie es zur zukünftigen Referenz auf.

BEMERK: Überprüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Im Falle einer Beschädigung NICHT verwenden. Kontaktieren Sie den Lieferanten oder Ki Mobility für weitere Anleitungen.

Axiom K Pediatric Rückenteil - Eigenschaften

HINWEIS: Einige Rückenlehenschalen verfügen möglicherweise über zwei Schlitze.

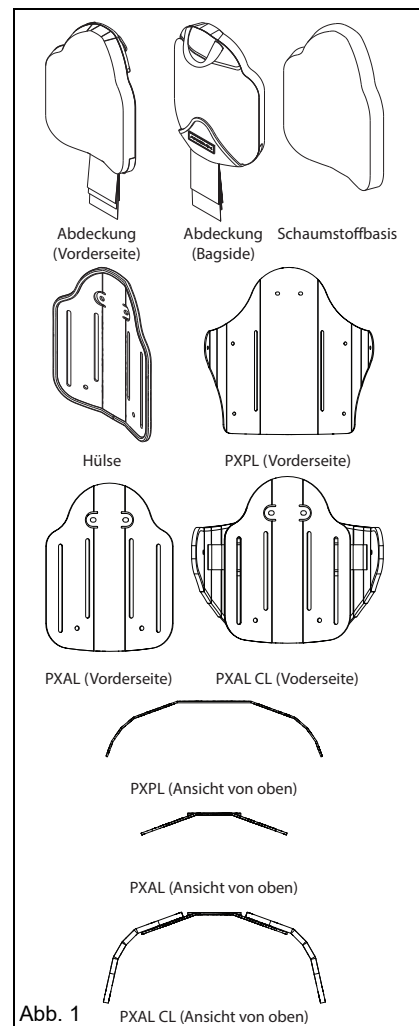

MAXIMALES GEWICHT DES BENUTZERS: 75 kg (165 lbs)

A. Vorgesehene Verwendung

Rollstuhlrückenlehnen von Ki Mobility dienen der Haltungsunterstützung, Druckverteilung und der Verbesserung der Sitztoleranz. Dieser Rollstuhl-Rückenteil ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert.

B. Ihre Sicherheit

Alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse oder Verletzungen im Zusammenhang mit der Benutzung Ihres Produkts oder dessen Zubehör müssen sofort gemeldet werden, wenn der Vorfall direkt oder indirekt zu einer schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung oder zum Tod des Benutzers oder einer anderen Person führt. Melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle und/oder Verletzungen an Ki Mobility und, falls durch örtliche Vorschriften vorgeschrieben, der zuständigen Gesundheitsbehörde, bei welcher der Benutzer und/oder eine andere Person ihren rechtmäßigen Wohnsitz hat.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, ohne vorher das gesamte Handbuch gelesen zu haben. VOR dem Gebrauch sollten Sie im sicheren Umgang mit diesem Produkt von einer Fachperson für assistierende Technologie (Assistive Technology Professional, ATP) oder eine andere kompetente klinische oder technische Fachperson geschult werden. Ki Mobility stellt viele verschiedene Produkte her, die Ihren Ansprüchen gerecht werden. Die anerkannte beste Praxis für die Auswahl eines Produkts besteht darin, sich mit einer Fachkraft für assistierende Technologie oder einer anderen kompetenten technischen Fachkraft und einer erfahrenen klinischen Fachkraft wie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder Arzt zu beraten. Die endgültige Auswahl des Produkttyps, der Optionen und Einstellungen liegt allein bei Ihnen und Ihrem technischen und klinischen Fachpersonal. Die von Ihnen gewählten Optionen sowie der Aufbau und die Einstellung des Produkts haben einen direkten Einfluss auf seine Leistung, Stabilität und seine Fähigkeit, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

C. Signalwörter

In diesem Handbuch finden Sie sogenannte „Signal“-Wörter. Durch diese Wörter wird das Ausmaß verschiedener Gefahren identifiziert und vermittelt. Bevor Sie diesen Rollstuhl benutzen, sollten Sie und alle Personen, die Sie gegebenenfalls unterstützen, dieses Handbuch komplett lesen. Bitte achten Sie auf das Signalwort und beachten Sie alle Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen oder Warnungen. Halten Sie sich unbedingt an alle Anleitungen und benutzen Sie Ihren Rollstuhl sicher. Die Signalwörter weisen auf eine Gefahr oder unsichere Verwendungsweise hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Ihnen oder anderen Personen führen kann. Die „Warnungen“ gliedern sich in folgende drei Hauptkategorien:

HINWEIS – Hinweis kennzeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu einem Leistungsabfall des Produkts oder zu Schäden an Ihrem Rollstuhl führen könnte.



VORSICHT

VORSICHT: Vorsicht kennzeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Verletzungen bei Ihnen führen könnte.



WARNUNG

WARNUNG: Warnung kennzeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Diese Signalwörter werden im gesamten Handbuch verwendet, um gegebenenfalls auf Gefahrensituationen hinzuweisen. Siehe Abschnitt G. für gefährliche Situationen, die für den allgemeinen Gebrauch dieses Produkts gelten.

D. Symbolglossar

SYMBOL	DEFINITION
	Gibt den Hersteller des medizinischen Geräts an.
	Herstellungsdatum (YEAR/MM/DD).
	Wenn es auf dem Medizinprodukt oder der Verpackung vorhanden ist, weist es darauf hin, dass der Anwender aus Sicherheitsgründen diese Anweisungen, wie z. B. Vorsichts- und Warnhinweise, beachten muss.
	Zeigt an, dass der Artikel ein medizinisches Gerät ist.
	Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes medizinisches Gerät identifiziert werden kann.
	Gibt den autorisierten Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft an.
	Kennzeichnet die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien erfüllt.
	Weist darauf hin, dass der Benutzer die Anweisungen zu Rate ziehen muss.
	Weist darauf hin, dass der Benutzer die angeführte Website für Anweisungen zur Verwendung in einem elektronischen Format beachten muss.
	Gibt eine Website an, auf der ein Benutzer zusätzliche Informationen über das Medizinprodukt erhalten kann.
	Zeigt eine bestimmte maximale Gewichtsgrenze an (lbs/kg).
	Zeigt einen Transit-Befestigungspunkt an.
	Zeigt eine mögliche Quetschstelle an.
	Gibt das Unternehmen, bzw. die Organisation an, welche das medizinische Gerät in die Region importiert.
	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.
	Maschinenwäsche, heiß
	Nicht bleichen
	Trocknen auf der Leine oder im Trockner, keine Hitze
	Nicht bügeln
	Nicht chemisch reinigen
	Zeigt die Herstellererklärung an, dass das Produkt die Anforderungen der geltenden UKCA-Richtlinien erfüllt.

E. Untersuchen Sie Ihre Haut täglich

Diese Axiom-Sitz- und Positionierungsprodukte sind so konzipiert, dass sie die Druckverteilung verbessern und die Sitztoleranz erhöhen. Ob das bereitgestellte Kissen Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, kann nicht im Voraus garantiert werden. Die Unversehrtheit Ihrer Haut kann durch viele Aspekte Ihres täglichen Lebens und Ihres Gesundheitszustands beeinträchtigt werden, auch durch die Verwendung dieses Produkts. Achten Sie darauf, die von Ihrem Arzt festgelegte Hautpflege einzuhalten.

E. Untersuchen Sie Ihre Haut täglich (Fortsetzung)

1. Benutzer dieses Produkts sollten sicherstellen, dass ihre Haut täglich auf Veränderungen untersucht wird. Wenn Sie Veränderungen feststellen, stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein und konsultieren Sie Ihren Kliniker. Ein wichtiger klinischer Indikator für Gewebeschäden ist Hautrötung. Wenn Ihre Haut Rötungen entwickelt, stellen Sie die Anwendung dieses Produkts sofort ein und konsultieren Sie Ihren Kliniker. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Untersuchung der Bereiche, die mit den knöchernen Vorsprüngen des Beckens zusammenhängen, wie z.B. Ihre Trochanter und Sitzbeinhöcker.

⚠️ WARNUNG ⚠️

WARNUNG: Das Versäumnis, einen Axiom-Rückenteil auszuwählen, der zu Ihrem Rollstuhl passt, kann zu Hautschäden, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⚠️ WARNUNG ⚠️

WARNUNG: Das Versäumnis einer gründlichen Hautinspektion oder die weitere Verwendung eines Axiom-Rückenteils nach Hautveränderungen kann Hautschäden verursachen und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

F. Allgemeine Warnhinweise

⚠️ WARNUNG ⚠️

WARNUNG: Verwenden oder installieren Sie dieses Axiom-Rückenteil nicht, ohne vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden zu haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten Ki Mobility Lieferanten oder Ihren Kliniker, wenn Sie Warnhinweise und Anleitungen nicht verstehen können. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

⚠️ WARNUNG ⚠️

WARNUNG: Das Anbringen eines Axiom-Rückenteils auf einem Rollstuhl könnte den Schwerpunkt des Rollstuhls beeinflussen. Änderungen Ihres Schwerpunkts können Ihre Stabilität im Rollstuhl beeinträchtigen und zum Umkippen oder Sturz aus dem Rollstuhl führen, was zu schweren Verletzungen führen kann. Überprüfen Sie immer die Gebrauchsanleitung Ihres Rollstuhls, um festzustellen, ob Änderungen am Rollstuhl erforderlich sind, um nach dem Anbringen eines Axiom-Rückenteils eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.

⚠️ WARNUNG ⚠️

WARNUNG: Die Unversehrtheit Ihrer Haut kann durch viele Aspekte Ihres täglichen Lebens und Ihres Gesundheitszustands beeinträchtigt werden, auch durch die Verwendung dieses Produkts. Achten Sie darauf, die von Ihrem Arzt festgelegte Hautpflege einzuhalten. Benutzer dieses Produkts sollten sicherstellen, dass ihre Haut routinemäßig nach Anweisung ihres Arztes auf Veränderungen untersucht wird. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

G. Ihr Axiom-Rückenteil schützen

Vermeiden Sie eine längere Belastung durch ungünstige Umwelteinflüsse. Dies kann eine übermäßige Belastung durch Sonnenlicht und heiße oder kalte Temperaturen beinhalten. Dies kann zu einer Verschlechterung der Leistung Ihres Axiom-Rückenteils führen.

⚠️ WARNUNG ⚠️

WARNUNG: Wenn Sie Ihr Axiom-Rückenteil nicht schützen, kann dies zu Veränderungen führen, was zu Hautschäden und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.


Obwohl Ihr Axiom-Rückenteil gemäß den gekennzeichneten Entflammbarkeitsstandards hergestellt wurde, sollten Sie vermeiden, Ihr Kissen offenen Flammen oder extremen Hitzequellen wie einer brennenden Zigarette auszusetzen. Dies kann dazu führen, dass sich Ihr Kissen entzündet oder schädliche Gase freisetzt.

⚠️ WARNUNG ⚠️

WARNUNG: Wenn Sie Ihren Axiom-Rückenteil nicht vor extremer Hitze schützen, kann sich Ihr Axiom-Rückenteil entzünden oder schädliche Gase freisetzen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

H. Ausrichtung des Bezugs

Ihr Axiom-Rückenteil wurde so konzipiert, dass er in einer bestimmten Ausrichtung sitzt, und er muss ordnungsgemäß in Ihrem Rollstuhl platziert werden, wobei der Bezug mit der Schaumstoffunterlage korrekt ausgerichtet sein muss. Sie ist beschriftet, um die richtige Ausrichtung anzuzeigen. Siehe Abb. 2.

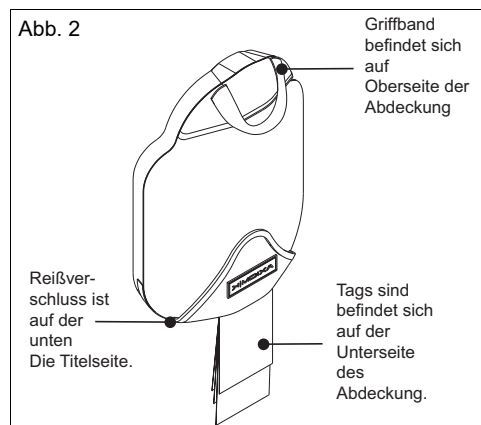

⚠️ WARNUNG ⚠️


WARNUNG: Wenn Sie das Kissen und den Bezug des Axiom-Rückenteils nicht richtig ausrichten, kann dies Hautschäden verursachen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Einrichten, Anpassen und Pflege


A. Abnehmen und Wiederanbringen der Rückenlehne

DEX Ausbau

1. Drehen Sie den Verriegelungshebel, um ihn zu lösen, und stellen Sie den Verriegelungsmechanismus in die Freigabeposition. Siehe Abb. 3.

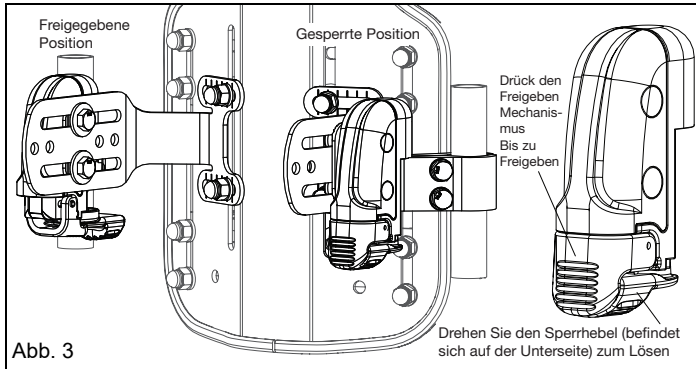


2. Entfernen Sie die Rückseite, indem Sie den Gurt anheben. Siehe Abb. 4.

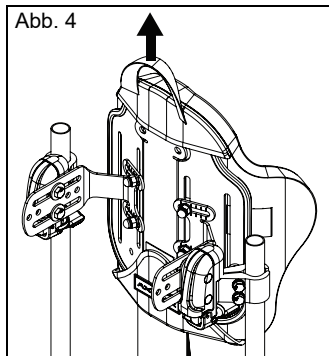


DEX Neuinstallation

1. Bringen Sie die Rückseite wieder an. Drehen Sie den Verriegelungshebel, um die Verriegelung einzurasten. Siehe Abb. 5.

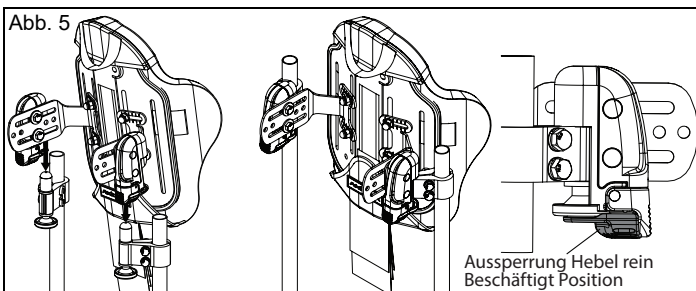


2. Verriegelungstest: Prüfen Sie visuell, ob der Riegel eingerastet ist (Abb. 6). Nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass die Rückseite arretiert ist. Siehe Abb. 6.

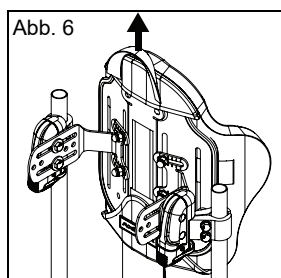

B. Wegschwenkbare seitliche Stütze - Betätigung

1. Drücken Sie die rote Taste am wegschwenkbaren Seitengelenk ein. Schwenken Sie die seitliche Stütze an die gewünschte Stelle. Siehe Abb. 7.

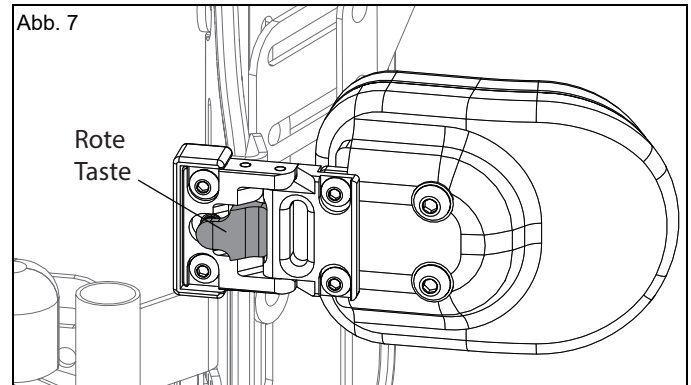

C. Schieben oder Anheben



WARNUNG

WARNUNG: Verwenden Sie den Axiom-Rückenteil nicht zum Anheben oder Schieben des Rollstuhls.

1. Verwenden Sie den Griff des Axiom-Rückenteils nicht, um das Gewicht des Rollstuhls zu heben. Er ist nur für die Entfernung des Axiom-Rückenteils vorgesehen.
2. Schieben oder Ziehen gilt als unsachgemäße Verwendung des Axiom-Rückenteils und kann dazu führen, dass sich das Axiom-Rückenteil unerwartet vom Rollstuhl löst. Bei Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann Ihr Stuhl beschädigt werden, oder es kann zu einem Sturz, Umkippen oder Kontrollverlust kommen, was zu schweren Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen kann.

D. Axiom-Rückenteil Transitsicherheit

Das Axiom-Rückenteil wurde gemäß den dynamischen Testanforderungen von ANSI/RESNA WC-4, Abschnitt 20 getestet: Rollstuhlsitzsysteme zur Verwendung in Kraftfahrzeugen oder ISO 16840-4 Rollstuhlsitz - Teil 4: Sitzsysteme für den Gebrauch in Kraftfahrzeugen. Vor der Verwendung eines mit einem Axiom-Rückenteil ausgestatteten Rollstuhls als Sitz in einem Kraftfahrzeug, sollte ein komplettes System aus Rollstuhlrahmen, Sitzgelegenheiten, Rollstuhlverankerungs- und Insassenrückhaltesystemen sowie ein ordnungsgemäß ausgestattetes Kraftfahrzeug vorhanden sein, die alle den in diesem Abschnitt genannten Normen entsprechen.



WARNUNG

ADVASEL: Die Nichtbeachtung jeglicher Anleitungen zur Installation, Verwendung und Wartung innerhalb dieses Handbuchs sowie der unten aufgeführten Transitanleitungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn der Axiom-Rückenteil in einem Rollstuhl verwendet wird, der als Sitz in einem Kraftfahrzeug verwendet wird.

1. Soweit möglich und durchführbar, sollte der Rollstuhlbenutzer auf den Fahrzeugsitz des Erstausrüsters umsteigen und die Fahrzeuggürtelsysteme benutzen.

D. Axiom-Rückenteil Transitsicherheit (Fortsetzung)

- Der Abstand zwischen der Oberkante der Schulter des Benutzers und der Oberkante des Axiom-Rückenteils sollte 14 cm (5,5") nicht überschreiten.
- Der Rollstuhl muss als für die Verwendung als Sitz in einem Kraftfahrzeug geeignet gekennzeichnet sein, nach den Leistungsanforderungen der ISO-Norm 7176-19 dynamisch getestet und gemäß den Anleitungen des Herstellers eingebaut, benutzt und gewartet werden.
- Wenn der ursprüngliche Rollstuhlsitz ersetzt wurde, muss der neue Sitz für den Rollstuhltransit zugelassen, installiert und verwendet werden, wie in den Anleitungen des Herstellers angegeben.
- Wenn Sie Ihren Rollstuhl als Sitz in einem Kraftfahrzeug benutzen, muss sich der Rollstuhlbenutzer in einer nach vorne gerichteten Position befinden.
- Der Fahrer muss ein "Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint System" (Rollstuhlverzurrgungs- und Insassenrückhaltesystem) verwenden, das ANSI-RESNA WC-4, Abschnitt 18 entspricht: Rollstuhlverankerungs- und Insassenrückhalte-Systeme zur Nutzung in Kraftfahrzeugen oder ISO 10542-1 Technische Systeme und Hilfen für Behinderte -- Rollstuhlverankerungs- und Insassenrückhalte-Systeme -- Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren für alle Systeme entspricht, und nach Anleitungen des Herstellers installiert, verwendet und gewartet wird.
- Die Verwendung von Beckengurten, Brustgurten, Schultergurten, sonstigen Positionierungsgurten oder Positionierungszubehör darf nicht als Insassenrückhaltesystem verwendet werden, es sei denn, es ist vom Hersteller gemäß ANSI-RESNA WC-4, Abschnitt 18 oder ISO 10542-1, Teil 1 als solches gekennzeichnet.
- Die Verwendung von Kopfstützen, seitlichen Stützen oder anderen Positionierungszubehörteilen darf nicht als Insassenrückhaltesystem verwendet werden, es sei denn, es ist vom Hersteller gemäß RESNA WC-4, Abschnitt 18 oder ISO 10542-1 - Teil 1 oder ANSI/RESNA WC-4, Abschnitt 20: Rollstuhlsitzsysteme zur Verwendung in Kraftfahrzeugen oder ISO 16840-4 Rollstuhlsitz -- Teil 4: Sitzsysteme für den Gebrauch in Kraftfahrzeugen.
- Aftermarket-Zubehör wie Ablagen, Sauerstofftankhalter, Sauerstoffflaschen, IV-Stangen, Rucksäcke, Beutel und andere Gegenstände sollten entfernt und separat im Kraftfahrzeug gesichert werden. Bei einem Unfall können diese Gegenstände zu gefährlichen Projektilen werden, die Sie oder andere Insassen des Kraftfahrzeugs verletzen oder töten können.
- Dieses Produkt ist für Fahrer mit einem Gewicht von bis zu 76 kg (165 lbs) geeignet).
- Wenn das Axiom-Rückenteil in einen Unfall verwickelt war, sollten Sie es nicht weiter benutzen, da er möglicherweise eine nicht sichtbare Belastung erlitten hat.

E. Wartung

Regelmäßige Reinigung und Wartung kann dazu beitragen, die Lebensdauer Ihres Axiom-Rückenteils zu verlängern. Sie sollten Ihr Axiom-Rückenteil monatlich überprüfen. Während der Reinigung wird eine Inspektion der Komponenten empfohlen.

- Prüfen Sie den Bezug auf Risse und übermäßige Abnutzung
 - Entfernen Sie den Bezug und überprüfen Sie ihn auf Auffälligkeiten (innen und außen).
 - Prüfen Sie den Schaum auf Zerfall oder Abnutzung.
- Überprüfen Sie die Beschlagteile auf Lockerheit, Anzeichen von Ablösungen, Degradation oder Deformationen.

WARNUNG

WARNUNG: Wenn Sie irgendwelche Auffälligkeiten feststellen, wie z.B. Schaumstoffbruch oder Schäden an den Beschlagteilen oder den Befestigungselementen, stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Ki Mobility Lieferanten. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies Hautschäden verursachen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

WARNUNG

WARNUNG: Der Eigentümer dieses Geräts ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass es von einem autorisierten Ki Mobility Lieferanten unter Anleitung einer medizinischen Fachperson eingerichtet und eingestellt wurde. Möglicherweise sind regelmäßige Sicherheits- und Funktionsprüfungen oder bestimmte Betriebseinstellungen, die vom Benutzer, der Pflegekraft oder einem autorisierten Ki Mobility Lieferanten durchgeführt werden können, notwendig.

- Befestigungselemente: Ki Mobility empfiehlt, alle Befestigungselemente alle sechs Monate auf ihre ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen, z.B. auf lose Schrauben oder beschädigte Komponenten. Lose Befestigungselemente sollten gemäß den Installationsanleitungen neu festgezogen werden.
- Ersetzen von Komponenten: Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren autorisierten Ki Mobility Lieferanten, um Komponenten auszutauschen. Stellen Sie die Verwendung des Systems ein, nachdem Sie lose oder beschädigte Komponenten identifiziert haben.

F. Reinigung

- Axiom-Rückenteil Bezug

HINWEIS: Das Trocknen mit Hitze kann zu einer Schrumpfung führen, welche die Passform und Funktion der Bezüge beeinträchtigt.

- Entfernen Sie den Bezug des Axiom-Rückenteils, indem Sie den Velcro®-Klettverschluss lösen. Öffnen Sie den Reißverschluss an der Unterseite des Bezugs.
- Den Schaumstoff leicht rollen und entfernen, um den Bezug von innen nach außen zu wenden.


F. Reinigung (Fortsetzung)

- c. Schließen Sie den Bezug mit dem Reißverschluss, um ein Verhaken zu vermeiden.
- d. Maschinenwäsche in warmem Wasser (60°C).
- e. Trocknen auf der Leine oder im Trockner, keine Hitze.

HINWEIS: Bezüge nicht chemisch reinigen und verwenden Sie zur Reinigung der Bezüge keine industriellen Waschmaschinen oder Trockner. Nicht dampfautoklavieren. Nicht bleichen. Die Definitionen der Wäschepflegesymbole sind in Abb. 9 dargestellt.

2. Axiom-Rückenteil Zusammenbau

- a. Entfernen Sie die gesamte hintere Baugruppe, um die Reinigung zu erleichtern. Siehe Abb. 8.

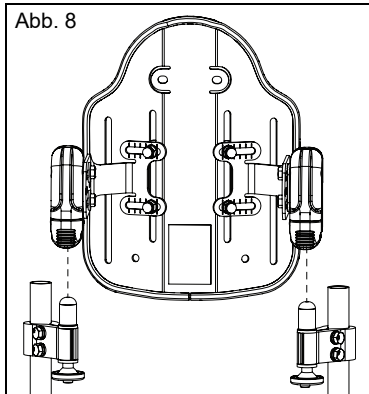

- b. Die Schale des Axiom-Rückenteils sollte regelmäßig mit Wasser und Seife abgewischt werden, um die Ansammlung von Schmutz und Verunreinigungen zu verhindern.

3. Positionierungskomponenten

- a. Positionierungskomponenten können mit Seife und Wasser abgewischt werden.
- b. Positionierungskomponenten NICHT unter Wasser tauchen.

Pflege- und Gebrauchsanleitungen	
	Maschinenwaschbar, 60°C
	Nicht bleichen
	Im Trockner trocknen, normal, keine Hitze
	Nicht bügeln
	Keine chemische Reinigung

Abb. 9

G. Desinfektion


Der Desinfektionsschritt sollte zusätzlich zur regelmäßigen Reinigung durchgeführt werden:

- a. Entfernen Sie den Bezug und waschen Sie ihn gemäß den Schritten 1a., 1b., und 1c. oben.
- b. Waschen Sie den Bezug in der Maschine nur in heißem Wasser (60°C).
- c. Hitzefrei abtropfen und im Trockner trocknen lassen.

- d. Desinfizieren Sie alle Oberflächen (Bezug, Schaumstoff und Rückenteil) mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel mit mindestens 70% Alkohol oder Desinfektionstüchern. Nicht durchnässen und auch nicht Reinigungslösungen in Pfützen ansammeln lassen.
- e. Lassen Sie das Desinfektionsmittel mindestens 15 Minuten lang auf die Oberfläche einwirken und entfernen Sie es mit einem sterilen Tuch falls erforderlich.

H. Wiederausammenbau Ihres Axiom-Rückenteils nach der Reinigung

1. Nach der Reinigung
 - a. Schaumstoff und Bezug wieder anbringen. Rollen Sie den Schaumstoff beim Anbringen des Bezugs leicht auf.
2. Wiederanbringen der Rückenteile
 - a. Um das Axiom-Rückenteil und die Aufnehmer der Beschlagteile wieder anzubringen, richten Sie die Stifte an den Aufnehmern aus.
 - b. Schieben Sie das Axiom-Rückenteil auf die Aufnehmer.
 - c. Wenn sie richtig eingesetzt werden, "klicken" die Stifte in eine verriegelte Position.
 - d. Drehen Sie den Verriegelungshebel, um die Verriegelung einzurasten.

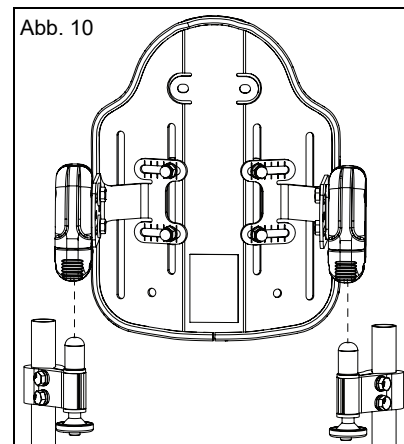

! WARNUNG !

WARNUNG: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das "Klicken" der Verriegelung gehört haben, ziehen Sie das Axiom-Rückenteil mit dem Griff nach oben, um zu testen und sicherzustellen, dass es sicher verriegelt ist. Wenn Sie diese Warnung nicht beachten, kann es zu Schäden an Ihrem Gerät, zu einem Sturz oder zum Verlust der Kontrolle kommen, und zu schweren Verletzungen des Rollstuhlbenutzers oder anderer Personen führen.

KI MOBILITY BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

Die erwartete Lebensdauer des Produkts ist fünf Jahre.

A. Für 24 Monate

Ki Mobility gewährleistet, dass das Axiom-Rückenteil für einen Zeitraum von 24 Monaten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese beschränkte Gewährleistung gilt für:

1. Axiom-Rückenteil Schale und Schaumstoff

Für einen Zeitraum von 24 Monaten (2 Jahre) ab Kaufdatum, bei normalem Gebrauch, repariert oder ersetzt Ki Mobility das Gerät nach eigenem Ermessen kostenlos, falls ein Material- oder Verarbeitungsfehler auftritt. Diese Gewährleistung gilt nicht für Punktionen, Risse oder Brandschäden.

B. Für 6 Monate

Ki Mobility gewährleistet, dass das Kissen für einen Zeitraum von 6 Monaten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese beschränkte Gewährleistung gilt für:

1. Abnehmbare Bezüge

Für einen Zeitraum von 6 Monaten ab Kaufdatum, bei normalem Gebrauch, repariert oder ersetzt Ki Mobility diese nach eigenem Ermessen kostenlos, falls ein Material- oder Verarbeitungsfehler auftritt. Diese Gewährleistung gilt nicht für Punktionen, Risse oder Brandschäden.

C. Beschränkungen

1. Wir übernehmen keine Gewährleistung für:
 - a. Schäden, die durch Vernachlässigung, Missbrauch oder durch unsachgemäßes Anbringen oder Reparatur entstehen.
 - b. Produkte, die ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Ki Mobility verändert wurden.
 - c. Schäden durch Überschreiten der Gewichtsgrenze.
2. Diese Gewährleistung ist UNGÜLTIG, wenn der Aufkleber des originalen Axiom-Rückenteils entfernt oder verändert wird.
3. Diese Gewährleistung gilt nur in den Nordamerika. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten, ob internationale Gewährleistungen gelten.
4. Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den Kauf durch den ersten Endverbraucher dieses Produkts über einen autorisierten Ki Mobility Lieferanten.

D. Was wir tun werden

Unsere einzige Haftung besteht in der Reparatur oder dem Austausch der Teile, die unter die Garantie fallen. Dies ist der ausschließliche Rechtsbehelf für Folgeschäden.

E. Was Sie tun müssen

1. Holen Sie von uns, solange diese Gewährleistung in Kraft ist, eine vorherige Genehmigung für die Rücksendung oder Reparatur der Teile ein, die unter die Garantie fallen.
2. Reklamationen und Reparaturen sollten über den nächstgelegenen autorisierten Lieferanten abgewickelt werden. Mit Ausnahme der hierin enthaltenen ausdrücklichen Gewährleistungen sind alle anderen Gewährleistungen, einschließlich impliziter Garantien der Marktgängigkeit und Gewährleistungen der Eignung für einen bestimmten Zweck, ausgeschlossen.

F. Hinweis für Endverbraucher

1. Soweit gesetzlich zulässig, tritt diese Gewährleistung an Stelle jeder anderen Gewährleistung (schriftlich oder mündlich, ausdrücklich oder implizit, einschließlich einer Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck).
2. Diese Gewährleistung gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

Notieren Sie hier Ihre Chargennummer (auf den Kissenanhängern), damit Sie später darauf zurückgreifen können:



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991



Authorized EU Representative:
Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp
Sweden



www.kimobility.com



DCN1146.0